

AQUA-SEAL™

SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO TRES CÁMARAS

Ficha Técnica Marca: Clasificación de riesgo:

AOUASEAL

IIA Método de esterilización: **ETO**

Sistema de drenaje torácico de tres cámaras (cámara sello de agua, recolección y control de aspiración) para el drenaje por gravedad y/o succión de fluidos y aire acumulado en la cavidad torácica por trauma o procedimiento quirúrgico.

1. Información básica del producto

- · Estéril / Desechable.
- · Con doble envoltura para presentación en campo estéril.
- · Capacidad: 2.300 CC.
- · Fabricado en policarbonato transparente.
- · Columna blanca indicadora de niveles de drenaje.
- · Conector estriado universal para tubo de tórax
- · Manguera flexible de KratoN (hipoalergénica, autosellable)
- · Manija de sujeción / Manijas metálicas para colgar en cama.
- · Pie azul giratorio en 90 grados para mayor estabilidad al colocarlo en el piso.
- · Válvula automática control de presión positiva /Válvula manual control de presión negativa.
- · Adaptador de control de succión para presiones mayores a -25 cm H2O. Su función es derivar la cámara control de aspiración (cm H20), por lo tanto, pasan directamente los milimetros de mercurio desde la red de aspiración central al equipo. Sólo con indicación médica.
- · Trampa de agua (Sello de agua) posee una esfera de azul de metileno que en contacto con el agua bidestilada ,tiñe esta de color azul como indicador.

2. Otras Especificaciones

- · Asegúrese de llenar la cámara "Sello de agua" hasta la línea de marca.
- · Pinzar el tubo de tórax antes de conectar a la tubería (Kraton).
- · Utilice la jeringa de prellenado, llenarla hasta la línea demarcada con 45ml de agua estéril, aqua bidestilada o solución salina.
- · Siga las instrucciones del fabricante para armar el sistema.



CÓDIGO **DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA** 8888571299 CAJA X 5 Sistema de drenaje torácico tres cámaras

Número de Registro INVIMA 2018DM-0018811 Fecha Vencimiento registro 25/10/2028 Fabricante: COVIDIEN LLC- 15 HAMPSHIRE - USA