

Mepilex® Heel

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con tecnología Safetac® y microadherencia selectiva, especializado para el talón.

- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Absorbe eficazmente, incluso bajo compresión.
- Gran adaptabilidad debido al film rugoso superior.
- Minimiza el riesgo de maceración.

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos y bacterias.
- Máxima evaporación y absorción.

Cuerpo absorbente de espuma de poliuretano

- Absorbe el exudado.
- Mantiene la integridad.
- Funciona bajo compresión.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.



Suave capa de silicona Safetac®

- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional^{2,3}, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Mepilex® Heel

Beneficios de Mepilex® Heel

- Puede permanecer en la herida durante varios días, dependiendo de las condiciones de la misma.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Puede cortarse a la medida.
- Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de apósito.
- Puede quitarse y adaptarse de nuevo a la herida sin perder sus propiedades de adherencia.
- Puede usarse junto a hidrogeles.


Indicaciones

Mepilex® Heel Puede usarse en un amplio rango de heridas exudativas, tales como lesiones por presión, úlceras en miembros inferiores o pie diabético.

Nota

Mepilex® Heel no debe usarse en heridas infectadas sin consultar a un profesional sanitario.

Forma de utilización de Mepilex® Heel

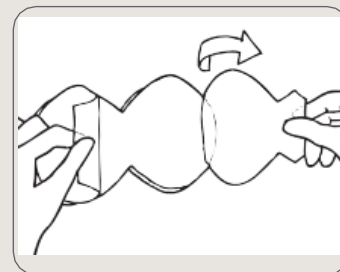

1. Limpiar la herida.
Retirar el film protector.



2. Mepilex® Heel Debe cubrir la piel perilesional 2 cm.
Colocar la cara adherente sobre la herida. No estirar.



3. Cuando sea necesario fijar Mepilex® Heel Use vendaje desostenimiento

PRESENTACIONES Mepilex Heel

CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
288100	13 x 20	5	2020DM-0021620

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
METODO ESTERILIZACION: ETO
PROCEDENCIA: Finlandia
VIGENCIA: 3 años
CERTIFICACIONES:
SO 9001, ISO 13485, CE 01965

Distribuidor Autorizado

CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Oficina 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com



Crosswell de Colombia S.A.S.


Mölnlycke®
www.molnlycke.com