


Fijación de suave silicona con Tecnología Safetac®.

- Atraumático para la piel durante la retirada.
- Fijación ideal para pacientes con la piel delicada.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.

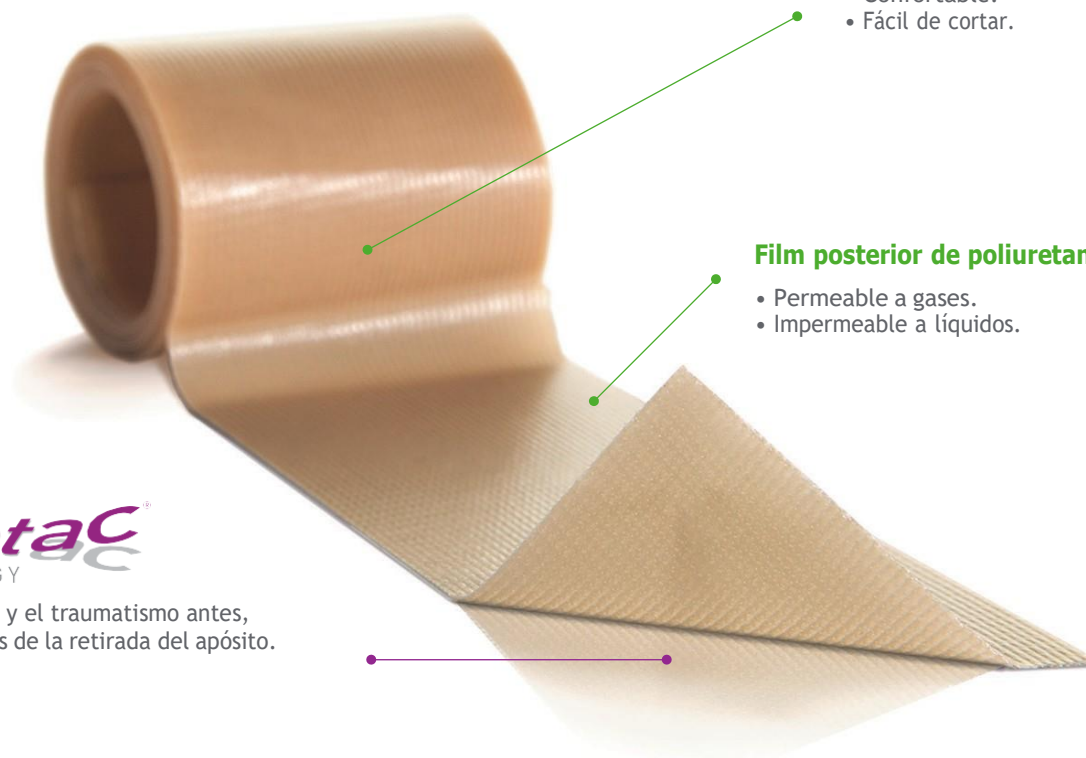

Tela tejida

- Confortable.
- Fácil de cortar.

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.

Safetac®
TECHNOLOGY

Minimiza el dolor y el traumatismo antes, durante y después de la retirada del apósito.

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional²,³, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Mepitac®

¿Cómo funciona Mepitac®?

Mepitac® es una fijación confortable y fácil de aplicar y retirar. La capa con Tecnología Safetac® asegura una fijación atraumática para la piel y el vello corporal. Si es necesaria una inspección de la zona o una recolocación, Mepitac® puede retirarse y volverse a fijar. Mepitac® es una fijación ideal para pacientes con la piel frágil o sensible y para pacientes que requieren una repetida aplicación y retirada de la fijación en la misma zona, por ejemplo, neonatos y pacientes de diálisis.

Nota

La adhesión de Mepitac® puede disminuir cuando se utiliza en ambientes húmedos como incubadoras, o en pacientes que tienen fiebre o que transpiran mucho.

Mepitac® no está recomendado para la fijación de catéteres o cánulas arteriales.

Beneficios de Mepitac®

- Atraumático durante la retirada.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- No deja residuos.
- Impermeable a líquidos.
- Permeable a gases.

Indicaciones

Mepitac® está diseñado para la fijación de equipos médicos como drenajes, tubos, electrodos, cánulas IV y apósitos. Además, Mepitac® ofrece una protección suave para la piel cuando se utiliza debajo de dispositivos médicos como por ejemplo tubos.

Precauciones


- Mepitac® no está recomendado en la fijación de sistemas de soporte vital.




PRESENTACIONES Mepitac®

CÓDIGO	TAMAÑO	UND X CAJA	REG. INVIMA
298300	2 cm x 3 mt	1	2021DM-0007550-R1
298400	4 cm x 1,5 mt	1	2021DM-0007550-R1


Forma de utilización de Mepitac®

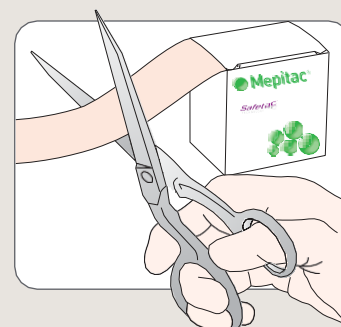

1. Asegurarse de que la piel está limpia y seca. Cortar la medida deseada con unas tijeras.

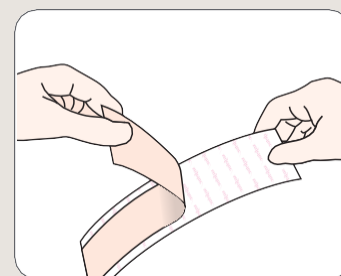

2. Retirar la tira protectora.

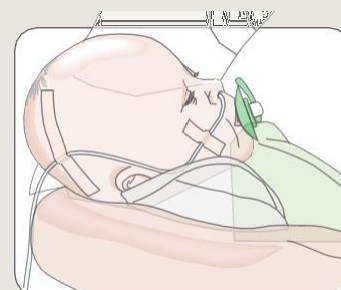

3. Aplicar Mepitac® sin estirar. Se puede retirar y recolocar, si es necesario

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
METODO ESTERILIZACION: No estéril
PROCEDENCIA: Finlandia
VIGENCIA: 3 años
CERTIFICACIONES:
CE-FDA- ISO 9001-ISO 13485

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 -Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 – Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com

