

Lámina de contacto de suave silicona con Tecnología Safetac® en ambas caras.

- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante el retiro.
- Puede permanecer colocado por hasta 14 días lo que permite no alterar el proceso de cicatrización.



Red de poliamida

- Estructura de red microperforada que permite un buen drenaje de exudado.
- Transparente.

Papel protector

- Protege la capa con Tecnología Safetac.
- Permite una aplicación estéril.

Safetac®
TECHNOLOGY

- Minimiza el dolor y el trauma antes, durante y después del retiro del apósito.¹
- Microadhesión selectiva. No se adhiere al lecho húmedo de la herida, si a la piel seca.³
- Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo de maceración.⁴

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional^{2,3}, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Mepitel®

¿Cómo funciona Mepitel®?

Mepitel® puede dejarse colocado en la misma herida durante varios días, dependiendo de las condiciones de la herida. La estructura porosa de Mepitel® permite al exudado pasar hacia el interior del apósito absorbente que se coloca encima. Mepitel® evita que este apósito absorbente se pegue a la herida, y por esta razón reduce el dolor y el traumatismo asociados a los cambios de apósito. Lo que se traduce en menores molestias para el paciente y asegura la no perturbación del proceso de cicatrización.

Beneficios de Mepitel®

- No se adhiere al lecho húmedo de la herida, sino al tejido seco.
- Reduce el traumatismo y el dolor en los cambios de apósito.
- Puede permanecer en la herida por hasta 14 días sin perjudicar el proceso de cicatrización.
- Disminuye el riesgo de maceración.
- Mepitel® y su papel protector son transparentes para una fácil aplicación e inspección de la herida cuando está colocado.
- Se adapta al contorno del cuerpo, proporcionando confort al paciente cuando lo usa.


Indicaciones

Mepitel® puede usarse en un amplio rango de heridas tales como, quemaduras, úlceras venosas, arteriales y diabéticas en piernas y pies, heridas dolorosas, heridas en fase de granulación, piel deteriorada o frágil, Epidermolisis Bullosa, lesiones por presión (no muy profundas), fijación de injertos, etc.


Precauciones

- Debe inspeccionar la herida para observar signos de infección.
- En injertos mallados evitar una presión innecesaria sobre Mepitel®.
- En un "resurfacing facial" evitar una presión innecesaria sobre Mepitel® y realizar el cambio al menos cada dos días.


Forma de utilización de Mepitel®

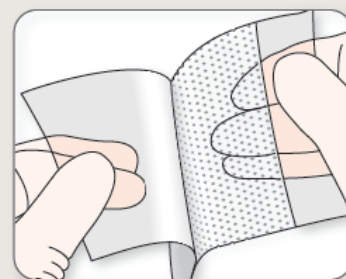

1. Limpiar la herida.
Retirar el film protector.

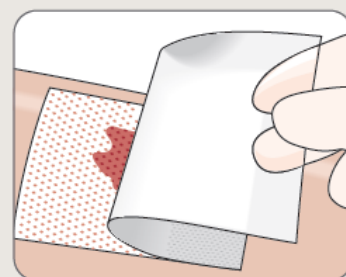

2. Colocar Mepitel® en la lesión.

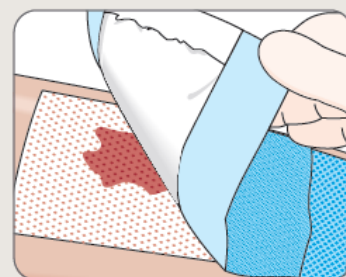

3. Aplicar encima un apósito absorbente.



CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
290599	7.5 X 5 cm	10	2021DM-0007550-R1
290799	7.5 X 10 cm	10	2021DM-0007550-R1
291099	10 X 18 cm	10	2021DM-0007550-R1
292005	20 X 30 cm	5	2021DM-0007550-R1

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
MÉTODO ESTERILIZACIÓN: Óxido de Etileno
PROCEDENCIA: Finlandia
VIGENCIA: 3 años
CERTIFICACIONES:
ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA

PRESENTACIONES Mepitel®

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com



Crosswell de Colombia S.A.S.


Mölnlycke®
www.molnlycke.com