

Granudacyn®

Solución de irrigación de limpieza, humectación y enjuague.

- Adecuada preparación del lecho de la herida
- Lavado de cavidades (Ej. peritoneal, vesical, quistes, quiste pilonidal)
- Prevención de Infección de sitio quirúrgico
- Quemaduras de 1er y 2º grado



Granudacyn Solución

- Ácido Hipocloroso 50 ppm
- Hipoclorito de Sodio 50 ppm



Granudacyn®

Forma de utilización de Granudacyn®

¿Cómo funciona Granudacyn®?

Granudacyn® es una solución de irrigación indicada para la limpieza y humectación de heridas contaminadas, crónicas y agudas, y quemaduras de primer y segundo grado. El ácido hipocloroso (HClO) garantiza una conservación inocua, lo que convierte a Granudacyn® en una solución de irrigación de heridas fiable. El ácido hipocloroso previene la proliferación de bacterias grampositivas y gramnegativas, incluyendo SARM, SARO, SARV, ERV, virus, hongos y esporas.

Para mejorar el efecto de limpieza, se recomienda dejar actuar por 60 segundos. Para ayudar a la limpieza mecánica de la herida, el tiempo de aplicación de la solución se puede ampliar a 5 minutos para eliminar las incrustaciones difíciles.

No requiere enjuague. La solución de irrigación se puede calentar a 37°C antes del uso.

Beneficios de Granudacyn®

- Limpia la herida mecánicamente.
- Está libre de gérmenes y tiene un pH neutro.
- Primera elección para el lavado peritoneal.
- Puede permanecer en la herida.
- Puede aplicarse sobre tejido del SNC, cartílago y huesos.
- Es hipotónico para promover la ósmosis y la ruptura celular.
- No es citotóxico ni irritante.
- Está libre de metales pesados.
- Reduce el mal olor de las heridas.
- Adecuado para fistulas.

Indicaciones

Granudacyn® puede ser utilizado para la limpieza, la humectación y el enjuague de los siguientes tipos de heridas:

- Todas las heridas crónicas independientemente de su profundidad, como úlceras del pie diabético, úlceras por presión, úlceras venosas de la pierna, etc.
- Todas las heridas agudas, cortes, mordeduras, desgarros, rozaduras.
- Heridas quirúrgicas (intraoperatorias y postoperatorias).
- Heridas en cartílagos, tendones, ligamentos o huesos.
- Quemaduras de hasta segundo grado.
- Cavitades como oídos, nariz, garganta.
- Heridas gravemente infectadas.
- Úlceras inducidas por radiación.
- Fistulas y abscesos.
- Lesiones en partes blandas.

Granudacyn® además puede ser utilizado para la humectación de apósitos, heridas y retirada de apósitos de heridas con costra.

Precauciones

La solución para irrigación no está indicada para el uso sistémico, no debe administrarse mediante inyecciones o perfusiones intravenosas o intraarteriales.

No debe combinarse con debridantes enzimáticos o productos químicos.

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes.

Aunque su ingestión no es peligrosa, no se recomienda.



1. Limpie cuidadosamente la herida con la solución



2A. Aplique la solución, desde una distancia aproximada de entre 15 y 30 cm directamente sobre la herida limpia.



2B Puede aplicar directamente sobre la herida o colocar sobre una gasa empapada.



Producto apto para usar con apósitos estándar.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UND. VENTA	REG. INVIMA
360100	250 ml Solución	Unitario	2023DM-0027387
360101	500 ml Solución	Unitario	2023DM-0027387
360102	1000 ml Solución	Unitario	2023DM-0027387
360103	500 ml Solución NPWT	Unitario	2023DM-0027387
360104	1000 ml Solución NPWT	Unitario	2023DM-0027387
360150	50 ml Solución	Unitario	2023DM-0027387

ALMACENAMIENTO: Mantener entre 3° y 25°C.

Proteger de la luz directa del sol.

METODO ESTERILIZACION: No estéril

PROCEDENCIA: Austria

VIGENCIA: Solución de irrigación: 24 meses y 60 días después de la apertura. Gel : 18 meses y 90 días después de la apertura.

CERTIFICACIONES:

CE, ISO 9001, ISO 13584, ISO 10993, ISO 14971

PRESENTACIONES Granudacyn®

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.968.509-6

Carrera 38 A No. 6-54 - Cali

Calle 125 No 21 A - 27 Oficina 301- Bogotá

e-mail: servicioalcliente@crosswellcool.com



Crosswell de Colombia S.A.S.

Mölnlycke®
www.molnlycke.com