



# STATLOCK®

## Ficha Técnica



### Indicación

Dispositivo de fijación StatLock® está diseñado para la estabilización segura de sondas vesicales en calibres de 8 a 26 Fr. maximizando su cuidado y eficiencia durante la estancia en el paciente.



### Contenido

El envase incluye el sistema de estabilización del StatLock® y parches para la preparación de la piel.



### Sistema de estabilización

Broche giratorio de 360° que asegura y estabiliza la sonda vesical reduciendo complicaciones por la tracción, tensión y fricción ocasionada por movimiento del paciente.



### Liberable

El broche tiene un mecanismo de apertura y bloqueo intuitivo que facilita la limpieza, revisión o cambio de sonda en el paciente.



### Compatibilidad y gentileza

Hipoalergénico de la larga duración, libre de látex con respaldo reforzado de Tricot y adhesivo de acrilato amigable al contacto con la piel del paciente.



### Etiquetado

Cuenta con una etiqueta de registro impresa en el mismo facilitando el registro del procedimiento.



### Protección de piel

Protector cutáneo en forma de dos toallitas estériles que maximiza el estándar de cuidado y eficiencia en la adhesión, creando una fina capa en la superficie de la piel que la protege de irritación o lesiones cutáneas.

*Para los más pequeños:* Fijador pediátrico con forma de osito, con respaldo de espuma suave y adhesivo de acrilato gentil con la piel, hipoalergénico y libre de látex para el confort de los pacientes más pequeños.



Estéril en:  
Óxidoetileno.



### Aspectos técnicos

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido           | el envase incluye el sistema de estabilización del StatLock® y parches para la preparación de la piel.                                               |
| Referencias         | VFDSSP Fijador para Sonda Foley 2 vías<br>Pediátrico calibres 8 a 10 Fr<br>FOL0102 Fijador para Sonda Foley 2 vías<br>Adulto calibres 12 a 26 Fr. 25 |
| Presentación        | Caja x 25 unidades                                                                                                                                   |
| Vida útil           | 3 años                                                                                                                                               |
| Registro sanitario  | INVIMA 2023DM-0027101                                                                                                                                |
| Tipo de dispositivo | NO INVASIVO                                                                                                                                          |
| Riesgo              | I                                                                                                                                                    |





### Consideraciones acerca de la seguridad y eficacia:

El dispositivo **StatLock®** es para un solo uso exclusivamente.

Esterilizado con óxido de etileno. Deseche el producto si el envase está abierto o dañado.

No altere el dispositivo **StatLock®** ni los componentes. El procedimiento tiene que ser realizado por personal con formación y que conozca las referencias anatómicas, las técnicas seguras y las complicaciones posibles.  
**SIN LÁTEX**



### Contraindicaciones:

Alergias conocidas a los adhesivos o esparadrapos.

### 1. — Advertencias y precauciones:

2. — 1. No utilice el dispositivo **StatLock®** donde pueda producirse una pérdida de adherencia, como puede suceder con un paciente confuso, con un dispositivo de acceso desatendido, o sobre piel diaforética o no adherente.
3. — 2. Observe las precauciones universales para la manipulación de sangre y líquidos corporales, y los procedimientos de control de infecciones durante la aplicación y la extracción del dispositivo **StatLock®**.
3. Manipule el catéter lo menos posible durante la aplicación y extracción del dispositivo **StatLock®**.
4. Mantenimiento diario
- a. El dispositivo **StatLock®** debe evaluarse a diario y cambiarse cuando esté clínicamente indicado, al menos cada siete días.
- b. Si se ensucia el parche, lávelo con jabón/agua, salino o peróxido de hidrógeno. No use alcohol ni sistemas de baño pre-ensados, que podrían hacer que se despegara prematuramente.
- c. Si se ducha/baña, cúbralo con un protector de plástico o un vendaje resistente al agua.
- d. Evalúe la piel antes de aplicarlo y repita esto a diario conforme al protocolo del centro.
- e. Siga el juicio clínico al retirar el dispositivo de estabilización del **StatLock®** si el paciente experimenta algún cambio de líquidos que podría afectar a la integridad de la piel.

#### BD Colombia

Calle 97 # 23-60 Piso 9 Ed. Torre Proksol  
Tel: (571) 7566060