


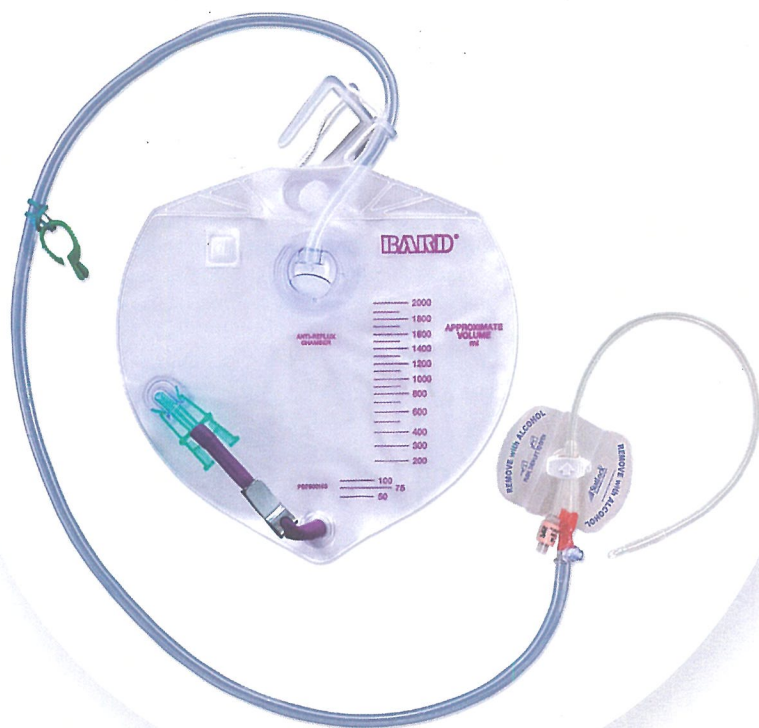

Sistema cerrado ADVANCE: Lubri-Sil™

Kit con catéter de silicón para el sondaje vesical

Descripción

Sistema compuesto de una sonda Foley de silicón lubricada, recubierta de hidrogel patentado que limita el contacto del látex con el epitelio uretral. Preconectada y unida con un sello de seguridad a una bolsa para la recolección de orina, con forma de gota que cuenta con urinómetro, válvula anti-reflujo, puerto para toma de muestra libre de aguja compatible con dispositivos luer lock, filtro de 0.2 µm (micras) y sistema de salida con pinza y capuchón de guardado, un estabilizador para la sonda (StatLock Foley Bard®) y una bandeja de un sólo uso, estéril que sirve para la colocación de la sonda y la bolsa. La bolsa de recolección de orina es un sistema cerrado con una capacidad de 2 L; la sonda Foley es de dos vías, con balón de autorretención reforzado (ribeteado) de 5 cc, disponible en calibre 14 Fr, 16 Fr o 18 Fr.

Insumos de la bandeja:

Un par de guantes libres de látex estériles, gel desinfectante para manos, un campo fenestrado, dos protectores impermeables, un sujetador de sábana, un contenedor de espécimen, una jeringa de 10 cc con agua estéril para insuflar el balón de autorretención, una jeringa no graduada con gel lubricante no inyectable, un sachet con 3 toallitas de jabón de castilla y 3 hisopos antisépticos.



Aspectos técnicos

Diámetro	Longitud	Composición	Vida Útil
14, 16, 18 Fr	5 cc	Silicón	3 años

Indicaciones de uso

Lubri-Sil™ está indicado para el cateterismo vesical.

Instrucciones de uso

El drenaje se logra introduciendo el catéter a través de la uretra hasta la vejiga. Sin embargo, algunas veces se consigue mediante vía suprapúbica u otra colocación del catéter, tal como el tracto de nefrostomía.

Se requiere personal capacitado para la colocación de la sonda vesical.

Indicaciones de transporte y almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente y evitar la exposición directa a la luz.

Conservar en su caja original.

Condiciones de uso

Estéril y desechable.

Advertencias

- No utilice pomadas ni lubricantes con vaselina, ya que dañan la silicona.
- Utilice la jeringa con punta Luer para inflar.
- Inspeccione visualmente el producto por si hubiere alguna imperfección o la superficie estuviere deteriorada antes de usarlo.
- No re-esterilizar ninguna parte de este dispositivo, al hacerlo podría originar riesgo de infección del paciente o usuario, afectar a la integridad estructural y/o a las características esenciales de los materiales y de diseño del dispositivo, lo cual podría dar lugar al fallo del dispositivo y/o una lesión, enfermedad o a la muerte del paciente.

Presentación comercial

Código	Descripción	Caja con
947314	Bandeja LubriSil™ de Sistema Cerrado 14 FR, Globo 5 cc y Bolsa Recolectora 2 L	10 piezas
947316	Bandeja LubriSil™ de Sistema Cerrado 16 FR, Globo 5 cc y Bolsa Recolectora 2 L	10 piezas
947318	Bandeja LubriSil™ de Sistema Cerrado 18 FR, Globo 5 cc y Bolsa Recolectora 2 L	10 piezas

INVIMA 2015DM-0013067

BD Colombia

Calle 97 # 23-60 Piso 9 Ed. Torre Proksol

Tel: (571) 7566060

2023 BD. El logo BD son marcas registradas por Becton, Dickinson and Company.

