



Ficha Técnica

Tensiómetro digital de muñeca BP-606

Aprovecha y ahorra
al máximo comprando
+ unidades



G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS



Síguenos en LenzColombia



Tensiómetro digital de muñeca BP-606

El tensiómetro digital de muñeca LENZ realiza una medición y control rápido y preciso de la presión arterial y el pulso.

Es automático, pues determina el inflado ideal y el valor promedio de los últimos tres registros. Solo tienes que fijar el monitor a tu muñeca y pulsar 1 un botón y en menos de un minuto tendrás tus resultados en la pantalla LCD del tu tensiómetro.

Pantalla LCD

NUEVA TECNOLOGÍA

Escala de resultados OMS

TECNOLOGÍA ALEMANA

GARANTÍA 3 AÑOS

DETECTA latidos irregulares

PROMEDIO de 3 últimas lecturas

INCLUYE estuche

GARANTÍA 3 años


DETECCIÓN inteligente

2 X 120 memorias

Pregunta por los **CTOS por compras al por mayor**



Su función principal es medir y mostrar la presión arterial **(sistólica, diastólica y la frecuencia del pulso)** al paciente de manera automática y precisa.

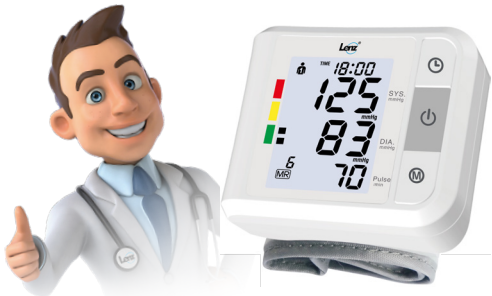

✓ Especificaciones técnicas

Referencia	BP-606
Rango de presión	40 a 260 mmHg
Tamaño	8.0 x 6.5 x 3.4 cm
Ajuste de brazalete	En velcro de gran agarre
Rango de pulso	40 a 200 latidos / minuto
Exactitud	SYS / DIA:± 3 mmHg
	Pulso± 5% de lectura
Garantía	3 años
Tipo de inflado	Automático con bomba interna
Función de memoria	2 usuarios (120 memorias cada uno)
Método de medición	Oscilométrico
Potencia	2 x 1.5V "AAA" (LR03)
Resolución de medición	1 mmHg
Dimensiones	80 * 65 x 34 ± 0.5 mm




Accesorios

- Tensiómetro
- Estuche (reposo muñeca)
- Certificación de calidad
- Manual de operación



Peso	Aprox 137 g (completo)	
Tamaño pantalla		34 x 45 mm
Operación	Temperatura	5 ~ 40 °C / 41 ~ 104 °F
	Humedad	15 % ~ 80% HR máximo
Almacenamiento	Temperatura	-20 ~ +50 °C / -4 ~ 122 °F
	Humedad	10 % ~ 93% HR máximo
Rango medición	SIS/DIA: 0a 260 mmHg (incrementa en 1 mmHg) Pulso: 40 a 200 latido/minuto	

Partes del dispositivo

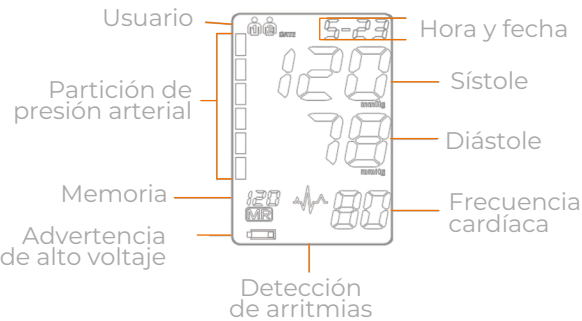


¿Cómo usar tu tensiómetro de muñeca?



Primer paso

Colócatelo en la mano izquierda (preferiblemente) de 0.5 a 1 cm de distancia de tu muñeca.

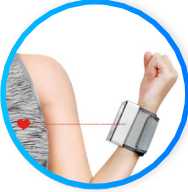

Segundo paso

Siéntate, reposa tu brazo y flexiónalo, déjalo en posición recta al corazón.



Tercer paso

Oprime el botón de encendido para iniciar la medición.