





Ficha Técnica

⊳FS20P

Oxímetro de pulso Pediátrico 🚭









Con el **oxímetro** de pulso **pediátrico** Lifen conoce los niveles de oxígeno y frecuencia cardíaca de niños y niñas. Es Ligero y portátil incluye un un cordón de viaje desmontable.

Usa un método no invasivo y es fácil de usar; abre la sonda, inserta el dedo y en segundos se obtendrán los resultados de manera sencilla y rápida.

$\Diamond_{o}$	₩-			$\bigcirc$	<b>₩</b>	
Saturación	Frecuencia	Forma de	Uso	Gráfico	Сигуа	Pantalla
de oxígeno	Cardíaca	de onda de pulso	pediátrico	de barras	pletismográfica	rotativa
Indicad Batería		Too				ncia de valor - parpadeo
Estado y apag	de suspensión ado automático				Operació un botón	on de 1

### Especificaciones técnicas

#### Referencia FS20P Resultados en pantalla SpO2, Pr, barra de pulso y ola Suspensión Automática Garantía 2 años Diámetro del dedo 0.3 "-0.44" DC2.3V ~ 3V (2 pilas AAA) Voltaje de trabajo Color Azul Dimensiones (mm) 1.14" x 1.18" x 2.09" Peso 0.74oz/21g Pantalla OLED 0.96" 128x64 px Rango: 70~100% Umbral de advertencia Precisión: ±2% 0~69% sin especificar SpO2

Resolución: 1%

# ¿Qué incluye?



Empaque y manual

3

;	Rango: 25 -250 lpm		
Especificaciones Frecuencia de pulso	Precisión: ±3 lpm		
Trecocricia de poiso	Resolución: 1bpm		
	Rango: 25-250 bpm		
Rendimiento de baja	Exactitud: ±3 bpm		
perfusión	Resolución:1bpm Pi >= 0.4% : SpO2 y PR se puenden detectar correctamente; Pi < 0.4% : Sin especificar.		
Temperatura	Operación 5°C ~ + 40°C		
lemperatora	Almacenamiento −40°C~ +60°C		
Humedad	Operación 10% ~ 95%		
Tiorneodo	Almacenamiento 10%~95%		



## ¿Cómo usar el oxímetro pediátrico?







#### Tabla de resultados

95 - 99 %	Normal
91 - 94 %	Hipoxia leve
86 - 90 %	Hipoxia moderada
< 86 %	Hipoxia severa

- 1 Identifica este ícono en la pantalla.
- **2** Este valor se expresa en % y corresponde a la saturación de oxígeno.
- **3** Compara el resultado arrojado con la tabla de resultados expuesta.