



Electrodos

REF. P5050-1

Para uso con **Estimuladores eléctricos**
TENS - EMS - Masajeador.



Set
de 4 unds



Tamaño
50x50 mm



Conector
2 mm



Adhesivos
hipoalergénicos



CE 2460



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
202, 2 / F, Building 27, Dafa Industrial Park, Longxi
Community, Longgang District, Shenzhen, China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe
Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany)



1

Limpia la piel

Limpiar la **zona de aplicación** con agua y jabón. Esto ayuda a **eliminar aceites naturales** que restan adherencia a las almohadillas.



2

Limpia las almohadillas

Después de **cada uso** límpialas con un paño húmedo. Asegúrate de usar una toalla que no pueda **dejar residuos**.



3

Cepilla las almohadillas

Cepíllalas en una **sola dirección**. Esto ayudará a exponer la adherencia del electrodo **para una mejor colocación**.



4

Usa geles especiales

Usa geles **conductores de electrodos** y aerosoles de electrolitos, ayudando a **prolongar la humedad** y a la **vida útil** de los electrodos viejos.