

Casete de peróxido de hidrógeno **STERRAD™ 100NX**



Casete de peróxido de hidrógeno **STERRAD™ 100NX**

Descripción Genérica:

Casete de Peróxido de Hidrógeno para sistemas
STERRAD™ 100NX



Códigos del producto:

10144



Descripción General

El casete de peróxido de hidrógeno STERRAD™ para el Sistema STERRAD™ 100NX y STERRAD™ 100NX con tecnología ALLClear™ está compuesto de una barra plástica que contiene 10 ampollas de peróxido de hidrógeno al 59%, con un volumen de 5,4 ml para cada ampolla, presentado en un empaque de cartón primario, sellado dentro de una bolsa plástica. Cada casete contiene una etiqueta de identificación

por radiofrecuencia que controlará el uso del mismo. El usuario debe de confirmar la fecha de caducidad del casete, como también el indicador de fuga para peróxido de hidrógeno contenido en la caja de cartón. Un eventual escape de peróxido de hidrógeno se mostrará por un cambio de color que el usuario puede comparar con las tonalidades de referencia contenidas en las Instrucciones de Uso del producto.

Presentación comercial:

Caja con 2 unidades. Cada unidad de casete tiene 10 ampollas. Cada casete podrá realizar hasta 5 ciclos de esterilización.

Concentración H₂O₂:

59%,

Cantidad de ampollas por casete:

10

Especificaciones de producto

Volumen de cada ampolla:

5,4 ml

Almacenamiento:

Almacenar en temperaturas entre 15 y 30°C.

Vencimiento:

15 meses

Nota: después de insertado en la máquina, el usuario tiene 10 días para utilizarlo, caso contrario automáticamente el casete será rechazado y devuelto al operador, que no podrá volver a utilizarlo.

Disposición final:

Cuando un casete está vacío, el esterilizador automáticamente lo lleva a la caja recolectora de casetes en el cajón de recolección. La pantalla mostrará un mensaje instructivo acerca de las acciones que se deben tomar a continuación. Cuando la caja recolectora esta llena, debe usted desechar completamente la caja recolectora de casetes. Consulte y siga las directrices de cada Institución/País.

Indicaciones Uso:

- Retirar la envoltura de plástico.
- Retirar el casete de la caja.
- Insertar el casete en el Esterilizador STERRAD™ 100NX.
- El casete será aceptado automáticamente.



Consulte siempre el instructivo de uso o el Manual del Operador del Esterilizador STERRAD™ 100NX para información adicional y advertencias.