


Tira de indicador químico **STERRAD**™

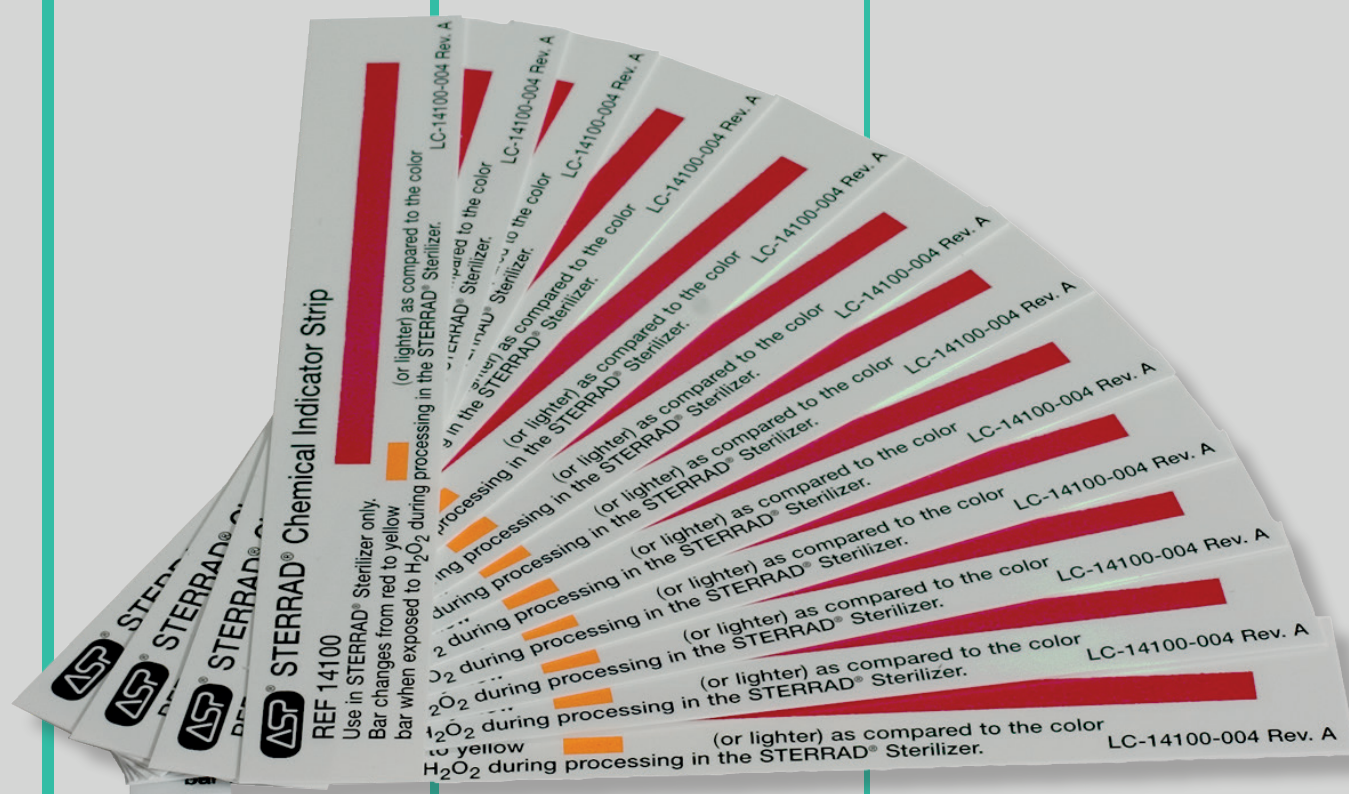

Tira de indicador químico STERRAD™


Descripción Genérica:

Tira indicadora química para sistemas de esterilización STERRAD™



Código del producto:

14100

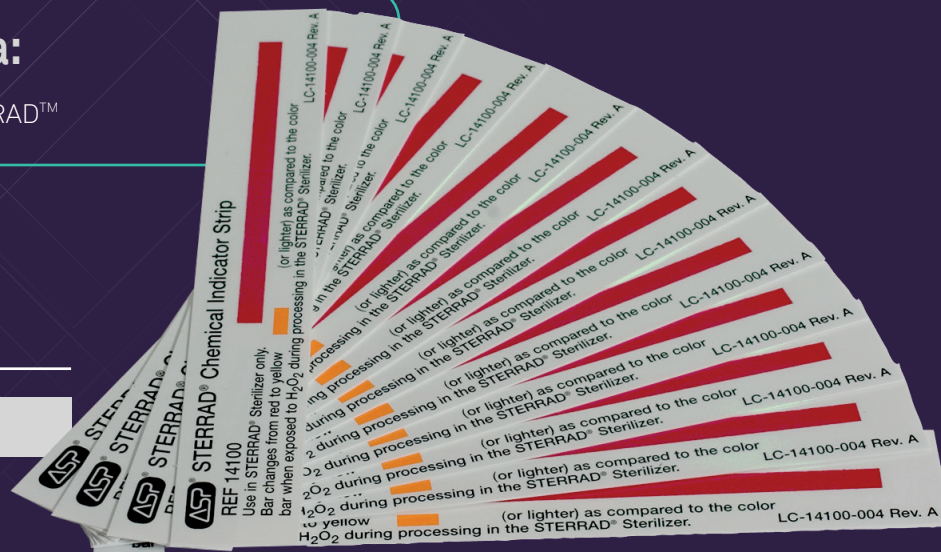

Descripción General

La tira de indicador químico STERRAD™ es un indicador de proceso Tipo 1 según la ISO 11140-1:2005 (para diferenciar los paquetes procesados de los no procesados), diseñada para su uso con paquetes de instrumental sanitario que se vayan a esterilizar en sistemas de esterilización STERRAD™:

- STERRAD™ 100S.
- STERRAD NX™.
- STERRAD™ 100NX.
- STERRAD™ 100NX con tecnología ALLClearn™.
- STERRAD NX™ con tecnología ALLClearn™.

La tira de indicador químico STERRAD™ es un indicador de proceso que debe ser utilizada con los sistemas de esterilización STERRAD™ de ASP. Las tiras de indicador químico STERRAD™ ofrecen formas adicionales de comprobar el procesamiento en el ciclo de esterilización. Deberían utilizarse además del indicador biológico, pero no en su lugar. Las tiras de indicador químico STERRAD™ no son indicativas de esterilización. Solo son indicativas de que el indicador ha estado expuesto al peróxido de hidrógeno.

Especificaciones de producto

Indicaciones de Uso:

1. Coloque la tira de indicador químico en el centro de cada paquete que se vaya a procesar en el esterilizador STERRAD™.
2. La barra del indicador pasa de rojo al color que se indica en la barra de comparación (o más claro) cuando se expone a peróxido de hidrógeno durante su procesamiento en el ciclo del esterilizador STERRAD™.
3. Después del procesamiento, si el usuario desea conservar la tira del indicador químico procesado para sus expedientes, debería conservarla en una bolsa de plástico. Evitar el contacto con papel o cartón y no tapar la tira directamente con cinta transparente.

Vencimiento:

18 meses.

Presentación comercial:

Cada caja incluye cuatro (4) envases de tiras de indicador químico STERRAD™. Cada envase incluye 250 tiras.

Dimensiones de cada indicador químico:

14 x 100 mm

Almacenamiento:

Conservar las tiras de indicador químico a temperatura ambiente, de 15°C a 30°C (59°F - 86°F), en un lugar seco.



Nota: Consulte siempre el instructivo de uso o la Guía del Usuario de los Esterilizadores STERRAD™ para información adicional y precauciones.