

CIDEX™ OPA

Desinfectante de Alto Nivel



CIDEX™ OPA

Desinfectante de Alto Nivel


Descripción Genérica:

Ortoftalaldehído al 0,55% de concentración



Códigos del producto:

20391

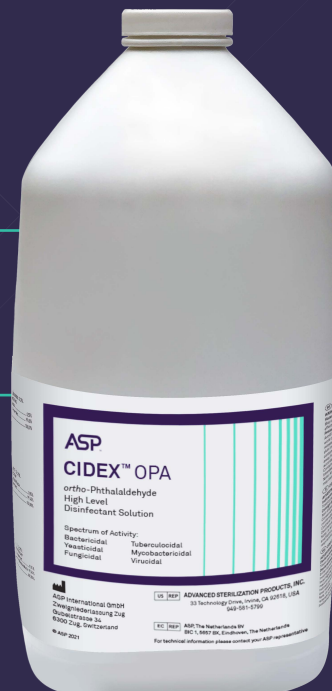

Descripción General

La Solución CIDEX™ OPA es un desinfectante de alto poder a base de ortoftalaldehído (OPA) en una concentración del 0,55%, para re-procesar productos sanitarios sensibles al calor cuando se utiliza conforme a las Indicaciones de Utilización. La Solución CIDEX™ OPA está diseñada para ser utilizada en sistemas manuales (cubo y bandeja) hechos de plástico de

polipropileno, acrilonitrilobutadieno-estireno (ABS), polietileno, polipropileno relleno de vidrio y/o policarbonato. La Solución CIDEX™ OPA puede también ser utilizada en reprocesadores de endoscopio automatizados conforme a las instrucciones del fabricante y deberá ser monitorizada con Tiras Reactivas de ensayo de la Solución CIDEX™ OPA.

Presentación comercial:

Galón con 3,78 litros.
Caja con 4 galones

Registro Sanitario:

INVIMA 2011 DM - 0007441



Especificaciones de producto

Indicaciones de uso:

Uso manual o en procesos automatizados. Sumerja el producto completamente, llenando todos los lúmenes y eliminando bolsas de aire, en la Solución CIDEX™ OPA durante a lo menos 5 minutos a 20°C (68°F) o temperatura mayor para destruir los microorganismos patógenos. Retire el producto de la solución y aclare completamente siguiendo las instrucciones de la IFU. Para mayor información refiérase a las instrucciones de uso del producto.

Actividad Microbicida:

La siguiente tabla indica el espectro de actividad demostrada por ensayo de la Solución CIDEX™ OPA utilizando los métodos de ensayo prescritos.

MICROORGANISMOS MICROORGANISMOS VEGETATIVOS

- Staphylococcus aureus
- Salmonella enterica (anteriormente, Salmonella choleraesuis)
- Pseudomonas aeruginosa
- Mycobacterium bovis

HONGOS

Trichophyton mentagrophytes

VIRUS NO-ENVUELTOS

- Poliovirus Tipo 1
- Rhinovirus Tipo 42
- Adenovirus Tipo 2
- Vaccinia (Wyeth)
- Coxsackievirus Tipo B-3

VIRUS ENVUELTOS

- Coronavirus
- Cytomegalovirus
- Virus de la Influenza [Hong Kong]
- HIV-1
- Herpes simplex Tipos 1,2

Compatibilidad:

La solución CIDEX™ OPA ha sido probada, y se ha determinado que es compatible con diversos tipos de materias primas, tales como metales, plásticos, elastómeros, adhesivos, endoscopios rígidos y blandos, como también equipos que puedan ser sumergidos en soluciones químicas.

Composición:

0,55% de ortoftalaldehído en una base acuosa, agentes quelantes e inhibidores de corrosión. No contiene surfactantes

Especificaciones de producto

Aspecto físico:

Solución de color azul claro

pH:

7.5 neutro

Disposición inal:

Verifique las regulaciones locales para el desecho. Puede utilizarse glicina (base libre) para neutralizar la Solución CIDEX™ OPA antes de desecharla. Deberá utilizarse un mínimo de 25 gramos de glicina (base libre) para neutralizar 3,78 litros de Solución CIDEX™ OPA. El tiempo mínimo recomendado de neutralización es de una hora. Elimine la solución residual vertiéndola por el desagüe. Enjuague el desagüe con abundante agua. Desecho del Envase: Absténgase de utilizar los envases vacíos. Aclare y deseche los mismos conforme a la política hospitalaria al efecto.

Almacenamiento:

- La Solución CIDEX™ OPA deberá almacenarse en su envase original sellado a temperatura ambiente controlada comprendida entre 15 - 30°C (59 - 86°F) en un área de bajo tráfico y bien ventilada.
- Una vez abierto, la porción no utilizada de la solución podrá ser almacenada en el envase original hasta un máximo de 75 días hasta que se utilice.
- La fecha de caducidad de la Solución CIDEX™ OPA se encuentra indicada en el envase.

Clasificación de riesgo:

Ila

Vencimiento:

24 meses



Nota: consulte siempre el instructivo de uso, para recomendaciones más detalladas.