

Cassette de peróxido de hidrógeno **STERRAD™ 100S**



Cassette de peróxido de hidrógeno **STERRAD™ 100S**

Descripción Genérica:
Cassette de peróxido de hidrógeno
para sistemas STERRAD™ 100S.



Códigos del producto:

10113



Descripción General

El cassette de peróxido de hidrógeno STERRAD™ para el Sistema STERRAD™ 100S está compuesto de una barra plástica que contiene 10 ampollas de peróxido de hidrógeno al 58%, volumen de 1,8 ml para cada ampolla, presentado en un empaque de cartón primario, sellado dentro de una bolsa plástica. El usuario debe confirmar la fecha de caducidad del cassette, como también el indicador de fuga para peróxido de hidrógeno contenido en la caja de cartón. Un eventual escape de peróxido de hidrógeno se mostrará por un cambio de color que el usuario puede comparar con las tonalidades de referencia contenidas en las Instrucciones de Uso del producto que vienen con cada cassette.

Presentación comercial:

Caja con 5 unidades. Cada unidad de cassette tiene 10 ampollas. Cada cassette podrá realizar hasta 5 ciclos de esterilización.

Concentración H₂O₂:

58%

Cantidad de ampollas por cassette:

10

Especificaciones de producto

Volumen de cada ampolla:

1,8 ml

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

Vencimiento:

12 meses

Nota: Después de insertado en la máquina, el usuario tiene 10 días para utilizarlo, caso contrario automáticamente el cassette será rechazado y devuelto al operador, que no podrá volver a utilizarlo.

Disposición final:

Cuando un cassette está vacío, el esterilizador automáticamente lo lleva a la caja recolectora de cassettes en el cajón de recolección. La pantalla mostrará un mensaje instructivo acerca de las acciones que se deben tomar a continuación. Cuando la caja recolectora está llena, debe usted desechar completamente la caja recolectora de cassettes. Consulte y siga las directrices de cada Institución/País.

Indicaciones de Uso:

- Retirar la envoltura de plástico.
- Retirar el cassette de la caja.
- Insertar el cassette en el Esterilizador STERRAD™ 100S.
- El cassette será aceptado automáticamente.



Nota: Consulte siempre el instructivo de uso o la Guía del Usuario del Esterilizador STERRAD™ 100S para información adicional y advertencias.

Los nombres de productos en mayúscula son marcas comerciales de ASP Global Manufacturing GmbH.

En Argentina: Advanced Sterilization Products S.A.S. Av. Congreso Nro. 3450 – CABA. Reg. San. PM-2726-1. **En Bolivia:** Reg. San. DI-58086/2021 (Made in Switzerland) Reg. San. DI-82118/2022 (Made in USA) **En Colombia:** Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. (ASP™) Carrera 19 No. 100 -45. Bogotá. Reg. San. INVIMA 2017DM-0000979-R1. **En Chile:** Advanced Sterilization Products Chile SpA. Avenida Sánchez Fontecilla # 310 oficina 201, Las Condes, Santiago. Producto no regulado. **En Costa Rica:** Reg. San. EMB-US-22-01088. **En Ecuador:** Advanced Sterilization Products ASP S.A.S. Calle Avenida República de El Salvador Número: 1084 Intersección: Avenida Naciones Unidas. Edificio Centro Comercial Mansión Blanca, Piso 0 Oficina 16. Reg. San. DM-0754-07-04. **En El Salvador:** IM-158717092015. **En Guatemala:** Reg. San. PMQ-15948. **En Honduras:** Reg. San. HN-DM-0321-0034. **En Nicaragua:** Reg. San. II04-260620-7860. **En Panamá:** ASP Panamá S de RL, Oceania Business Plaza, Piso 21, Oficina 21D, Ciudad de Panamá. Producto no regulado. **En Paraguay:** eMedical Group. Mayor S. Bullo e/ Félix de Azara – Asunción. Reg. San. 04894-01-DM. **En Perú:** Importado y Distribuido por: Platinum Corp S.R.L. Calle Las Camelias N°164 Int. 302 San Isidro Lima. Teléfono: 511-4210137. platinum@platinumcorp.com.pe. Reg. San. DM24714E (Made in USA) Reg. San. DM22594E (Made in Switzerland). **En Puerto Rico:** ASP Puerto Rico LLC, 500 Calle de la Tanca, Suite 401, San Juan, PR 00901. Producto regulado. **En República Dominicana:** Producto no regulado. **En Uruguay:** eMedical Group. Uruguay 1525 – Montevideo. Reg. San. 42048.