

Cinta con indicador químico **SEALSURE®**



Cinta con indicador químico

SEALSURE®

Descripción Genérica:

Cinta con indicador químico para sistemas de esterilización con gas plasma de peróxido de hidrógeno.



Código del producto:

14202



Descripción General

La cinta con indicador químico STERRAD® SEALSURE® (ISO 11140-1: 2005) es un indicador para todo el proceso que los proveedores de cuidados sanitarios pueden utilizar para fijar los paquetes y envoltorios de esterilización no tejidos en los sistemas de esterilización STERRAD® de ASP. La cinta con indicador químico SEALSURE® permite una forma adicional de verificar el procesamiento en el ciclo de esterilización.

El color de la cinta con indicador químico SEALSURE® cambia de rojo al color que se indica en la barra de comparación (o más claro) cuando esta se expone a peróxido de hidrógeno, y se utiliza para diferenciar cargas procesadas y no procesadas. Consulte la barra de comparación de colores en las instrucciones de uso.

Debe usarse como complemento, no como sustituto del indicador biológico. La cinta con indicador químico SEALSURE® no garantiza la esterilización, tan solo señala que el indicador se ha visto expuesto a peróxido de hidrógeno.

Especificaciones de producto

Presentación comercial:

Caja con seis (6) rollos de Cinta con indicador químico SEALSURE®

Dimensiones del rollo:

55 metros (60 yardas)

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente, 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F), en condiciones secas.

Vencimiento:

22 meses

Clasificación de riesgo:

I

Fabricante:

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.

Indicaciones Uso:

1. Use la cinta con indicador químico SEALSURE® para asegurar el envoltorio de esterilización. La cinta con indicador químico SEALSURE® también se puede usar para cerrar el extremo abierto de las bolsas antes de cargarlas en el esterilizador STERRAD® cuando no se dispone de un sellador por calor. Coloque un extremo en la solapa y apriete con los dedos a lo largo de la cinta hasta el extremo del paquete. No estire la cinta.
2. Las marcas de la cinta cambian de rojo a dorado (o más claro) cuando se exponen a peróxido de hidrógeno durante el procesamiento en el esterilizador STERRAD®. Este cambio de color sirve para diferenciar los paquetes procesados de los no procesados.
3. Retire la cinta rasgando la solapa del envoltorio del paquete. No quite la cinta. Al rasgar la cinta se evita volver a sellar un paquete que se haya abierto por error y la formación de residuos.



consulte siempre las instrucciones de uso para información adicional y advertencias.