

Tiras reactivas **CIDEX™** OPA



Tiras reactivas **CIDEX™** OPA

Descripción Genérica:

Tiras de concentración mínima efectiva para ortoftalaldehído



Códigos del producto:

20392

20393



Descripción General

Tiras indicadoras que fueron desarrolladas para la medición de la concentración mínima efectiva (CME) del desinfectante de alto nivel de rápido uso CIDEX™ OPA 0,55% ortoftalaldehído durante el periodo de utilización de esta solución. La tira indicadora CIDEX™ OPA mide la concentración de ortoftalaldehído en el uso manual o automatizado, a través de un reactivo químico y un comp-

uesto químico (sulfito de sodio) presentes en la tira de prueba. La concentración mínima efectiva (CME) del ortoftalaldehído en solución será señalada por la coloración violeta en la tira de prueba, después de un periodo de contacto específico con la solución, desde que esta concentración se encuentre por encima del 0,3%.

Presentación comercial:

20392 – 2 frascos. Cada frasco contiene 60 unidades de cintas reactivas

20393 – 2 frascos. Cada frasco contiene 15 unidades de cintas reactivas

Almacenamiento:

Almacenar entre 15°C a 30°C, en ambiente seco.

Disposición final:

Deseche la tira reactiva usada en un recipiente de residuos según la política del hospital.

Vencimiento:

6 meses, después de abierto, el frasco tiene vencimiento en 90 días.

Especificaciones Técnicas

Este producto ha sido desarrollado exclusivamente para pruebas en solución de ortof-talaldehído 0,55% - CIDEX™ OPA.

Indicaciones Uso:

1. Asegúrese que la solución que va a someterse al ensayo ha sido dispensada de acuerdo a las indicaciones de su etiqueta.
2. Anote siempre la fecha en que se abrió la botella y la fecha tras la cual "No utilizar después de la fecha indicada" en el espacio al efecto de la botella. Asegúrese de que se cumplen las precauciones de seguridad apropiadas cuando se efectúe el ensayo de la solución de CIDEX™ OPA, consúltese la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad de los Materiales de la solución de CIDEX™ OPA.
3. Extraiga la tira reactiva de la botella y vuelva a colocar la tapa inmediatamente.
4. Utilice un reloj o temporizador para monitorizar las etapas siguientes.
5. El control del tiempo es crítico para garantizar una lectura exacta.
6. Sumerja completamente el papel indicador situado al final de la tira reactiva dentro del recipiente con la solución de CIDEX™ OPA objeto del ensayo. Manténgala sumergida durante 1 segundo y retírela. No deje la tira en la solución objeto del ensayo durante un tiempo superior a 1 segundo ni "agite" la tira reactiva en la solución. Una técnica incorrecta de inmersión, como agitar la tira reactiva vigorosamente en la solución, eliminará los re-activos del área del papel de la tira reactiva. Esto puede causar una falta de formación de color púrpura (lo que indica FALLO) al verificar una solución que normalmente resultaría como aceptable (PASAN el ensayo).
7. Retire el exceso de solución del papel indicador manteniendo la tira recta sobre una toalla de papel. No sacuda la tira después de retirarla. Cuando retire el exceso de solución, si se utilizan técnicas incorrectas tales como

sacudir violentamente la tira reactiva y/o secar la cara del papel de la tira reactiva contra una toalla de papel puede retirar los reactivos y la solución, lo cual puede de nuevo causar se obtenga una lectura de FALLO, en soluciones que normalmente resultarían aceptables (PASAN el ensayo).

8. Lea los resultados que presenta la reacción coloreada en el papel indicador 90 segundos después de que se retire la tira reactiva de la solución. Si se lee antes de 90 segundos, el cambio de color puede ser incompleto y puede ser interpretado incorrectamente. No lea el papel indicador después de 90 segundos, cuando el color gradualmente destiñirá dificultando la interpretación. Si se lee después de 90 segundos, el color cambiará gradualmente indicando "FALLO". Para indicar que la concentración de CIDEX™ OPA es superior a la concentración mínima efectiva de la solución de CIDEX™ OPA, el papel indicador deberá estar completamente púrpura. Se acepta cualquier tonalidad de púrpura; la intensidad variará debido a la variación de concentración. Si aparece algún resto azul en el papel indicadora parte del de la línea superior, la concentración de la solución de CIDEX™ OPA está por debajo de la MEC de 0,3 % y debería desecharse. Consulte la referencia visual en la botella de tiras reactivas para interpretar los resultados. Anote el resultado del ensayo en un diario apropiado al efecto.

Clasificación de riesgo:

Exento

Registro Sanitario:

Exento

Fabricante:

© Advanced Sterilization Products



consulte siempre el instructivo de uso del producto, para recomendaciones más detalladas.