

Rollos Tyvek®

con Indicador Químico STERRAD™



Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Rollos Tyvek®

con Indicador Químico STERRAD™

Descripción Genérica:

Rollos con Indicador Químico STERRAD™ para sistemas de esterilización de gas plasma de peróxido de hidrógeno.



Códigos del producto:

12407, 12410, 12415, 12420,
12425, 12435, 12450.



Descripción General

Los rollos Tyvek® con indicador químico STERRAD™, están diseñados para envolver dispositivos médicos que se van a esterilizar de forma terminal en los sistemas STERRAD™. Los rollos cuentan con un indicador químico externo, que es un indicador de proceso (ISO 11140-1:2014 [Tipo I]). Este presentará cambio de color de rojo al color indicado en la barra del comparador del envase de almacenamiento (o más claro) cuando haya exposición al peróxido de hidrógeno en el ciclo de esterilización, pero no indica esterilidad.

Los rollos están fabricados con dos capas: una capa transparente no permeable compuesta por un laminado de poliéster y polietileno de baja densidad, y otra capa opaca permeable compuesta por una poliolefina expandida validada por ASP™ (Tyvek®). El Tyvek® permite la entrada del agente esterilizante y posterior barrera microbiana. Los empaques permitirán el mantenimiento de la esterilidad hasta el momento de la apertura del dispositivo, desde que las condiciones de almacenamiento hayan sido adecuadas.

Gramaje Total:

66 g/m²

Temperatura de Sellado:

Entre 121°C y 135°C.

Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Especificaciones de producto

Instrucciones de Uso:

Corte la longitud deseada del rollo, introduzca los dispositivos médicos y selle los extremos siguiendo las instrucciones del sellador térmico. Cuando se selle térmicamente por primera vez la bolsa o rollo Tyvek®, el operador deberá establecer el intervalo de temperatura de sellado/tiempo de espera para la máquina específica que vaya a utilizarse y según la fuerza necesaria para desprender el sello al abrir el paquete. Si el ciclo de esterilización es abortado o es cancelado por el operador, se debe desechar el empaque utilizado. Consúltase la barra del comparador del envase de almacenamiento para conocer el cambio de color adecuado después del procesado.

Vencimiento:

24 meses

Almacenamiento:

Almacénese el producto a temperatura ambiente, comprendida entre 15 °C y 30 °C (59 °F y 86 °F), en lugar seco. Evítese exponer a la luz el lado del rollo que contiene el indicador químico. Antes y después del procesamiento, manténgalo lejos del esterilizador STERRAD™ o las fuentes de agentes antimicrobianos volátiles, álcalis, ácidos o peróxidos de hidrógeno tales como glutaraldehído y formaldehído.

Presentación comercial:

CÓDIGO	Dimensiones del Rollo
12407	75 mm x 70 m
12410	100 mm x 70 m
12415	150 mm x 70 m
12420	200 mm x 70 m
12425	250 mm x 70 m
12435	350 mm x 70 m
12450	500 mm x 70 m

El logo y los nombres de productos en mayúscula son marcas comerciales de ASP Global Manufacturing GmbH. | Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Publicidad no válida en Bolivia, Ecuador y Guatemala.

En Argentina: Advanced Sterilization Products S.A.S. Av. Congreso Nro. 3450 – CABA. En Colombia: Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. (ASP™) Carrera 19 No. 100 -45. Bogotá. En Chile: Advanced Sterilization Products Chile SpA. Avenida Sánchez Fontecilla # 310 oficina 201, Las Condes, Santiago. En México: Advanced Sterilization S. de R.L. de C.V. Avenida Santa Fe 94 Torre A Piso 8, Oficina 808, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. En Panamá: ASP Panamá S de RL, Oceania Business Plaza, Piso 21, Oficina 21D, Ciudad de Panamá. En Paraguay: eMedical Group. Mayor S. Bullo e/ Félix de Azara – Asunción. En Puerto Rico: ASP Puerto Rico LLC, 500 Calle de la Tanca, Suite 401, San Juan, PR 00901. En Uruguay: eMedical Group. Uruguay 1525 – Montevideo.

©Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. (ASP™) 2023. Todos los derechos reservados. Contenido destinado a Profesionales de la salud. | 000453-230313