

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea la sección Información importante de seguridad en este manual de instrucciones antes de usar la unidad.

Siga este manual de instrucciones meticulosamente para su seguridad.

Guarde el manual para futura referencia. Si desea información específica sobre su propia presión arterial, CONSULTE A SU MÉDICO.

Contraindicaciones

- El uso del dispositivo en entornos ambulatorios está contraindicado.
- El uso del dispositivo en aviones está contraindicado.

Advertencia

Indica una situación potencialmente peligrosa

que,

si

no

se

evita,

podría

dar

como

resultado

lesiones

graves

o,

incluso,

ser

fatal.

- NO ajuste su medicamento sobre la base de los resultados de las mediciones de este monitor de presión arterial. Tome su medicamento como lo recetó su

médico. Solamente un médico está calificado para diagnosticar y tratar la presión arterial alta.

- NO use este monitor en un brazo lastimado o bajo tratamiento médico.
- NO coloque el brazalete en el brazo durante un goteo intravenoso o una transfusión de sangre.
- NO aplique ni infle el brazalete en partes del cuerpo que no sean la parte superior del brazo.
- NO use este monitor en áreas que contengan equipos quirúrgicos de alta frecuencia (HF), equipos de imagen de resonancia magnética (IRM), equipos de tomografía computarizada (TAC), o en un ambiente rico en oxígeno.
- NO use este monitor con infantes, niños o con otras personas que no puedan expresar su consentimiento.
- Consulte a su médico antes de usar este monitor si sufre de arritmias comunes, como latidos auriculares o ventriculares prematuros o fibrilación auricular; aterosclerosis; mala perfusión; diabetes; embarazo; preeclampsia; o enfermedad renal. Tenga en cuenta que cualquiera de estas afecciones además de moverse, temblar o tiritar por parte del paciente puede afectar los resultados de la medición.
- Consulte siempre a su médico. Es peligroso que se autodiagnostique según los resultados de las mediciones y que decida usted mismo sobre su tratamiento.
- Contiene piezas pequeñas que podrían causar un peligro de asfixia si las traga un infante o un niño.
- Mantenga las PILAS fuera del alcance de infantes y niños.
- Este producto emite radiofrecuencias (RF) en la banda de 2.4 GHz. NO use este producto en lugares donde se prohíbe el uso de RF, como aviones u hospitales. Para más información sobre restricciones potenciales, consulte la documentación de uso de **Bluetooth** de la FCC.

Precaución

Indica una situación potencialmente peligrosa que,

si

no

se

evita,

puede

provocar

lesiones

leves

o

moderadas

al

usuario

o

al

paciente

o

daños

al

equipo

u

otros

bienes.

- Deje de usar este monitor y consulte a su médico si experimenta irritación en la piel o molestias.

- Consulte a su médico antes de utilizar este monitor en un brazo con derivación arteriovenosa (A-V).
- Consulte a su médico antes de usar este monitor si ha tenido una mastectomía.
- Consulte a su médico antes de usar el monitor si tiene problemas graves de flujo sanguíneo o trastornos sanguíneos, ya que inflar el brazalete puede causar magulladuras.
- No tome mediciones con más frecuencia de lo necesario ya que pueden producirse magulladuras debido a la interferencia en el flujo sanguíneo.
- Retire el brazalete si no comienza a desinflarse durante la medición.
- No utilice este monitor para ningún otro fin que no sea la medición de la presión arterial.
- No utilice un teléfono celular u otros dispositivos eléctricos que emitan campos electromagnéticos cerca del monitor, excepto cuando transfiera sus lecturas a su dispositivo inteligente. Esto podría ocasionar el mal funcionamiento del monitor.
- No desarme ni trate de reparar el monitor ni los componentes. Esto podría causar una lectura incorrecta.
- No lo utilice en una ubicación donde haya humedad o riesgo de que la unidad se salpique con agua. Hacerlo podría dañar el monitor.
- No utilice este monitor en un vehículo en movimiento, como un automóvil.
- No deje caer el monitor ni lo exponga a golpes fuertes o vibraciones.
- No utilice este monitor en lugares de alta o baja humedad, o alta o baja temperatura. Consulte la sección "8. ESPECIFICACIONES" de este manual.
- Observe el brazo utilizado y asegúrese de que el monitor no cause una obstrucción en la circulación sanguínea del paciente.
- No utilice este monitor en entornos de alto uso, como en clínicas o consultorios médicos.
- Evite bañarse, tomar bebidas alcohólicas o cafeína, fumar, hacer ejercicio y comer durante 30 minutos antes de tomar una medición.
- Descanse durante al menos 5 minutos antes de tomar la medición.

- Quite toda vestimenta ajustada o gruesa del brazo al tomar la medición.
- Quédese quieto y no hable durante la medición.

Transmisión de datos

- No reemplace las pilas mientras las lecturas se transfieren a su dispositivo inteligente. Esto podría dar como resultado la operación incorrecta de su monitor y los datos de presión arterial podrían no transferirse.
- No coloque tarjetas con circuitos integrados, imanes, objetos metálicos u otros dispositivos que emitan campos electromagnéticos cerca del monitor durante la transferencia de sus lecturas a su dispositivo inteligente. Esto podría dar como resultado la operación incorrecta de su monitor y los datos de presión arterial podrían no transferirse.

Manejo y uso de las pilas

- No coloque las pilas con las polaridades incorrectamente alineadas.
- Utilice únicamente 4 pilas "AAA" alcalinas para este monitor. No utilice otro tipo de pilas. No use pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
- Retire las pilas si no se utilizará el monitor durante un periodo prolongado.
- En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua limpia. Consulte inmediatamente a un médico.
- Si el fluido de las pilas entra en contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua tibia y limpia. Si la irritación, la lesión o el dolor persisten, consulte a un médico.
- No use las pilas después de su fecha de vencimiento.
- Revise las pilas periódicamente para garantizar que estén en buenas condiciones de funcionamiento.
- Use únicamente las pilas especificadas para este monitor. El uso de pilas no compatibles podría dañar y/o ser peligroso para el monitor.