

Información importante de seguridad

Antes de usar este monitor, es importante que lea la información de seguridad de este manual de instrucciones.

Siga este manual de instrucciones meticulosamente.

Consérvelo para futura referencia. Si desea información específica sobre su propia presión arterial, CONSULTE A SU MÉDICO.

Advertencia

Indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no evitarse, podría causar lesiones graves o la muerte.

- **NO utilice este monitor en infantes, niños ni en personas que no puedan expresar su consentimiento.**
- **NO ajuste la dosis de su medicamento en función de las lecturas de este monitor de presión arterial. Tome su medicamento como lo recetó su doctor. SOLAMENTE un médico está calificado para diagnosticar y tratar la presión arterial alta.**
- **NO utilice este monitor en un brazo lastimado o bajo tratamiento médico.**
- **NO coloque el brazalete en su brazo durante un goteo intravenoso o una transfusión de sangre.**
- **NO utilice el monitor en áreas que contengan equipos quirúrgicos de alta frecuencia (HF), de resonancia magnética (MRI) ni de tomografía computarizada (CT). Esto podría provocar el funcionamiento incorrecto del monitor o una lectura imprecisa.**
- **NO utilice este monitor en entornos con mucho oxígeno ni cerca de fuentes de gases inflamables.**
- **Consulte a su médico antes de usar este monitor si padece de arritmias comunes, como latidos auriculares o ventriculares prematuros, o fibrilación auricular, aterosclerosis, mala perfusión, diabetes, embarazo, preeclampsia o enfermedades renales. TENGA**

EN CUENTA que cualquiera de estas afecciones, así como los movimientos o temblores del paciente, pueden afectar la lectura de la medición.

- **NUNCA** se diagnostique ni se trate usted mismo basándose en sus lecturas. Consulte **SIEMPRE** a su médico.
- Para evitar la estrangulación, mantenga el tubo de aire y el cable del adaptador de ca lejos de bebés y niños pequeños.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían causar un peligro de asfixia si las traga un infante o un niño.

Transmisión de datos

- Este producto emite radiofrecuencias (RF) en la banda de 2.4 GHz. **NO** use este producto en lugares donde se prohíbe el uso de RF, como en aviones u hospitales. Desconecte la función Bluetooth en este monitor y quite las pilas o desenchufe el adaptador de ca cuando se encuentre en zonas restringidas de uso de RF.

Manejo y uso del adaptador de ca (accesorio opcional)

- **NO** use el adaptador de ca si el monitor o el cable del adaptador de ca están dañados. Si el monitor o el cable están dañados, desconecte la alimentación y desenchufe el adaptador de ca inmediatamente.
- Enchufe el adaptador de ca en una toma con voltaje apropiado. **NO** lo use en un enchufe con salida múltiple.
- **NO** enchufe ni desenchufe el adaptador de ca de la toma eléctrica con las manos mojadas.
- **NO** desarme ni intente reparar el adaptador de ca.

Manejo y uso de las pilas

- Mantenga las pilas fuera del alcance de infantes y niños.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no

Precaución

se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente, o daños al equipo u otros bienes.

- **Interrumpa el uso del monitor y consulte a su médico si presenta irritación de la piel o molestias.**
- **Consulte a su médico antes de utilizar el monitor en un brazo con un acceso o tratamiento intravascular, o una derivación arteriovenosa (A-V), ya que la interferencia temporal en el flujo sanguíneo podría provocar una lesión.**
- **Consulte a su médico antes de usar el monitor si ha tenido una mastectomía.**
- **Consulte a su médico antes de usar este monitor si tiene problemas graves de flujo sanguíneo o trastornos de la sangre, ya que inflar el brazalete puede provocar hematomas.**
- **NO realice mediciones con más frecuencia de lo necesario, ya que podrían producirse hematomas como resultado de la interferencia del flujo sanguíneo.**
- **SOLO infle el brazalete cuando esté colocado alrededor de la parte superior de su brazo.**
- **Quite el brazalete si no comienza a desinflarse durante una medición.**
- **NO utilice este monitor para ningún otro fin que no sea medir la presión arterial.**
- **Durante la medición, asegúrese de que no haya dispositivos móviles ni otros dispositivos eléctricos que emitan campos electromagnéticos en un radio de 30 cm de distancia de este monitor. Esto podría provocar el funcionamiento incorrecto del monitor o una lectura imprecisa.**
- **NO desarme ni trate de reparar este monitor ni otros componentes.**

Esto podría causar una lectura incorrecta.

- **NO utilice este monitor en un lugar donde haya humedad o riesgo de salpicaduras de agua. Esto podría dañar este monitor.**
- **NO utilice este monitor en un vehículo en movimiento, como un automóvil o una aeronave.**
- **NO deje caer ni someta este monitor a golpes fuertes ni vibraciones.**
- **NO utilice este monitor en lugares con alta o baja humedad, o con altas o bajas temperaturas. Consulte la sección 10.**
- **Durante la medición, observe el brazo para asegurarse de que el monitor no produzca una obstrucción prolongada de la circulación sanguínea.**
- **NO utilice este monitor en entornos de alto uso, como clínicas o consultorios médicos.**
- **NO use este monitor simultáneamente con otros equipos médicos eléctricos (ME). Esto podría provocar el funcionamiento incorrecto de los dispositivos o una lectura imprecisa.**
- **Evite bañarse, tomar bebidas alcohólicas o cafeína, fumar, hacer ejercicio y comer, como mínimo, 30 minutos antes de tomar la medición.**
- **Descanse durante, al menos, 5 minutos antes de tomar la medición.**
- **Sáquese las prendas ajustadas o gruesas del brazo para tomarse la medición.**
- **Permanezca quieto y CALLADO mientras se mide la presión arterial.**
- **Use este brazalete EXCLUSIVAMENTE en personas cuya circunferencia de brazo se encuentre dentro del rango especificado del brazalete.**
- **Asegúrese de que este monitor se haya aclimatado a la**

temperatura ambiente antes de tomar una medición. Tomar una medición luego de un cambio brusco de temperatura podría resultar en una lectura imprecisa. OMRON recomienda esperar alrededor de 2 horas para que el monitor se caliente o se enfríe cuando se utilice en un entorno dentro de la temperatura especificada en las condiciones de funcionamiento, después de haberlo guardado en un lugar con la temperatura máxima o mínima de almacenamiento. Para obtener información adicional sobre la temperatura de funcionamiento y almacenamiento/transporte, consulte la sección 10.

- NO utilice este monitor una vez finalizado el periodo de duración. Consulte la sección 10.
- NO doble el brazalete ni el tubo de aire de manera excesiva.
- NO doble ni enrosque el tubo de aire mientras toma una medición. Esto puede provocar una lesión al interrumpir el flujo sanguíneo.
- Para desconectar el conector de aire de plástico, sáquelo jalando de la base del tubo, y no del tubo.
- Use ÚNICAMENTE el adaptador de ca, el brazalete, las pilas y accesorios que se especifican para este monitor. El uso de adaptadores de ca, brazaletes y pilas no compatibles podría dañar o ser peligroso para este monitor.
- Use ÚNICAMENTE el brazalete aprobado para este monitor. Si utiliza otros brazaletes, es posible que obtenga lecturas incorrectas en la medición.
- El inflar el dispositivo a una presión más alta que la necesaria puede provocar magulladuras en el brazo en el cual se coloca el brazalete. NOTA: Consulte el apartado “Si su presión sistólica es superior a 210 mmHg” en la sección 3 de este manual de instrucciones para obtener información adicional.

Transmisión de datos

- **NO cambie las pilas ni desenchufe el adaptador de ca mientras la lectura se transfiere a su smartphone. Esto podría ocasionar un mal funcionamiento del monitor y fallas en la transferencia de datos de presión arterial.**

Manejo y uso del adaptador de ca (accesorio opcional)

- **Inserte completamente el adaptador de ca en la toma de corriente.**
- **Para desenchufar el adaptador de ca de la toma de corriente, tire con cuidado del adaptador de ca. NO tire del cable del adaptador de ca.**

- **Al manipular el cable adaptador de ca:**

NO lo dañe.

NO lo rompa.

NO lo manipule.

NO lo doble a la fuerza ni tire de él.

NO lo retuerza.

NO lo use si está recogido en un paquete.

NO lo pellizque.

NO lo coloque debajo de objetos pesados.

- **Limpie el polvo del adaptador de ca.**
- **Desenchufe el adaptador de ca cuando no lo esté usando.**
- **Desenchufe el adaptador de ca antes de limpiar el monitor.**

Manejo y uso de las pilas

- **NO coloque las pilas con las polaridades incorrectamente alineadas.**
- **Utilice SOLO 4 pilas “AA” alcalinas o de manganeso en este monitor. NO use otro tipo de pilas. NO use pilas nuevas y usadas al mismo tiempo. NO use pilas de distintas marcas al mismo tiempo.**
- **Quite las pilas si este monitor no se utilizará por un período**

prolongado.

- **En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua limpia. Consulte con su médico de inmediato.**
- **En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con la piel, enjuague la zona de inmediato con abundante agua limpia tibia. Si la irritación, la lesión o el dolor persiste, consulte a su médico.**
- **NO use pilas vencidas.**
- **Revise las pilas periódicamente para asegurarse de que funcionen bien.**