



Medline Industries Ltd
Three Lakes Dr, Northfield, IL
60093, Estados Unidos

www.medline.com



Ficha técnica

Mascaras de No-Re inhalación

Información de Registro

Producto	MASCARAS DE OXIGENO Y AEROSOL
Marca	HUDSON RCI, MULTI-VENT
Registro Sanitario	INVIMA2019DM-0019420
Expediente Registro Sanitario	20157698
vigencia registro	Febrero 2029
Fecha emisión registro	25 febrero 2019
País de origen	Mexico, Estados Unidos
Fabricante	TELEFLEX MEDICAL, MEDLINE INDUSTRIES, LP
Riesgo	IIA
Presentación	Caja de 50 unidades
Usos	Administración de terapia de oxígeno y aerosol.
Material componentes	PVC, POLIPROPILENO, ELASTICO, ALUMINIO, VINILO,HDPE, POLIESTERENO. Libre de látex
Condiciones de almacenamiento	Condiciones generales de almacenamiento
Tipo de dispositivo	No invasivo
Vida útil	5 años, uso único por paciente

Referencias

Mascarilla SEE-THRU® sin retorno							
Ref.	Categoría	Código IDM	Configuración	Flujo bajo en LPM	Concentración de O2	Accesorios	Unidades/caja
1059	Adulto	14026704648105	Alargada medio abierta	5-10	67-95	Tubo de 210 cm, 1 válvula unidireccional de aleta, reservorio de 750 ml	50
1058	Pedriátrica	4026704594269	Alargada medio abierta	5-10	67-95	Tubo de 210 cm, 1 válvula unidireccional de aleta, reservorio de 750 ml	50
1060	Adulto	14026704648129	Alargada cerrada	10-12	69-97	Tubo de 210 cm	50

Descripción

Las mascarillas de alta concentración de oxígeno adecuadas para la administración nasal u oral de oxígeno.

El producto consta de una mascarilla con o sin un tubo de oxígeno de 210 cm. Un reservorio de 750 ml está unido a la máscara y tiene una válvula de no re inhalación que impide que el aire exhalado por el paciente vuelva al reservorio, lo que permite administrar concentraciones muy altas al paciente.

Las mascarillas están disponibles para pacientes adultos y de pediatría y están fabricadas con un plástico muy suave y transparente que permite una fácil supervisión del procedimiento y una mayor comodidad para el paciente.

El suministro de oxígeno recomendado para la mascarilla de alta concentración es de entre 8 y 12 litros por minuto.

La entrada de oxígeno y la entrada de aire ambiental están situadas en la parte delantera de la máscara, que fluye hacia el reservorio desde donde es inhalado por el paciente. Se puede introducir o evitar el aire ambiental adicional regulando las válvulas de aleta alrededor de los puertos de exhalación, lo que disminuye o aumenta la concentración de oxígeno. No es necesario un cierre hermético.

Materiales principales

Mascarilla de oxígeno, tubo, conector, tubo de suministro: Policloruro de vinilo (PVC) con DEHP

Bolsa respiratoria: Vinilo

Arandela, carrito-combo: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Refuerzo Tira: aluminio

Elástico: Poliéster, caucho

Válvulas de aleta: 1 o 2 válvulas de exhalación de silicona extraíbles

No fabricada con látex de caucho natural

Cantidad por caja

Envasado individual en bolsas de plástico. 50 unidades por caja.

Envasado

Bolsa individual de polietileno no estéril (PE)

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

Clase: IIa no estéril

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

MÁSCARAS DE NO REINHALACIÓN

Adultos

Código de artículo 1059

- La válvula de retención de resistencia baja evita la reinhalación y permite el escape del gas exhalado.
- No se fabricó con látex de caucho natural.
- La banda elástica puede ajustarse fácilmente para adaptarse a un amplio rango de tamaños de cabeza.
- Vinilo transparente y suave para la comodidad y evaluación visual del paciente.
- La ventilación de seguridad permite la entrada de aire ambiente.
- El clip de nariz ajustable asegura un ajuste cómodo.
- Incluye una bolsa de depósito de 750 ml.
- Disponible con sonda de suministro de oxígeno Star Lumen® de 7 ft.



1059

MÁSCARAS DE NO REINHALACIÓN

Adultos

Código de artículo 1060

- La válvula de retención de resistencia baja evita la reinhalación y permite el escape del gas exhalado.
- No se fabricó con látex de caucho natural.
- La banda elástica puede ajustarse fácilmente para adaptarse a un amplio rango de tamaños de cabeza.
- Vinilo transparente y suave para la comodidad y evaluación visual del paciente.
- El clip de nariz ajustable asegura un ajuste cómodo.
- Una bolsa de depósito de 750 ml.
- Disponible con sonda de suministro de oxígeno Star Lumen de 7 ft.



1060