

Medline Industries Ltd

Three Lakes Dr, Northfield, IL 60093, Estados Unidos

www.medline.com



Ficha técnica

Información

de Registro

Humidificadores de burbujas no precargados (vacío)

Producto	HUMIDIFICADORES	
Marca	HUDSON RCI,	
Registro Sanitario	INVIMA2019DM-0019265	
Expediente Registro Sanitario	20156725	
vigencia registro	Enero 2029	
Fabricante	TELEFLEX MEDICAL, MEDLINE INDUSTRIES, LP	
País de origen	México; Estados Unidos	
Riesgo	IIA	
Tipo de dispositivo	No invasivo	
Vida útil	5 años, uso único por paciente	
Presentación	Caja de 50 unidades	
Usos	Agregar humedad en forma de vapor de agua a los gases respiratorios entregados a los pacientes.	
Condiciones de almacenamiento	Condiciones generales de almacenamiento	
Componentes	Jarra humidificadora, tapa, difusores, válvula de alivio.	
Material componentes	POLIPROPILENO, CINTA SILICONA, POLIETILENO, PVC, RESINA K	

Referencias

			Válvula de descarga	
Referencia	Capacidad	Reutilizable	de presión	Unidades/caja
		No reutilizar, reprocesar ni		
3230	500 ml/4PSI	re esterilizar	Sí	50
		No reutilizar, reprocesar ni		
3260	500ml/6PSI	re esterilizar	si	50

Código IDM (UDI-DI)

Referencia	Código IDM
3230 HUMIDIFIER,EMPTY,STANDARD,500ML,4 PS,OUS.Humidificador de burbuja de 4PSI 500ml	14026704657169
3260 HUMIDIFIER, EMPTY, HIGH FLOW,500ML,6 P, OUS. Humidificador de burbuja de 6PSI 500ml	4026704596430

Descripción

Reservorio no precargado destinado a la humidificación de los gases respiratorios y, por tanto, de las vías respiratorias.

Este humidificador recargable consta de un adaptador fácil de usar, combinado con una botella transparente de 500 ml.

Una alarma sonora avisa al profesional sanitario de cualquier obstrucción del flujo que se produzca en el humidificador o en el tubo de oxígeno cuando la presión sea de hasta 0,275 bares (4 PSI y 6 PSI)

Un micro difusor colocado en la botella genera burbujas muy pequeñas y aumenta la superficie de intercambio, permitiendo una humidificación poco ruidosa.

HUMIDIFICADOR DE BURBUJA (BORBOTEADOR) 500 ML 4 PSI Referencia 3230

El borboteador de 4-PSI posee una válvula de descarga de presión audible, que señala si hay obstrucción del humidificador o del tubo de suministro al llegar a 4 PSI.



Capacidad de 500ml.

Plástico duradero y desechable.

Líneas de nivel de agua máximo y mínimo definidas.

Alarma audible preestablecida a 4 psi de alivio de presión.

Su conexión en niple reduce la posibilidad de romper la conexión del flujómetro.

Diseñado para proporcionar al paciente una humedad terapéutica cómoda y un ruido mínimo.



HUMIDIFICADOR DE BURBUJA (BORBOTEADOR) 500 ML 6 PSI

El borboteador de 6-PSI posee una válvula de descarga de presión audible, que señala si hay obstrucción del humidificador o del tubo de suministro al llegar a 6 PSI. Permite el uso de longitudes más largas del tubo de suministro sin sonar la alarma audible.

Características:

Diseñado para proporcionar al paciente una humedad terapéutica cómoda y un ruido mínimo.

Su conexión en niple reduce la posibilidad de romper la conexión del flujómetro.


Alarma audible preestablecida a 6 psi de alivio de presión.

Capacidad de 500 ml.

2 a 12 LPM

Plástico duradero y desechable.

Líneas de nivel de agua máximo y mínimo definidas.

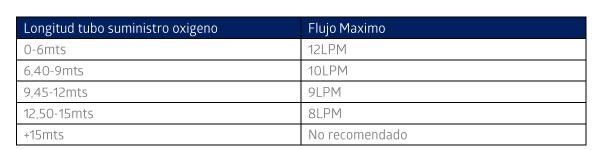

Materiales principales Reservorio: Polietileno (PE) Adaptador: Poliestireno

Punta del adaptador: Polipropileno (PP)

Válvula de descarga de presión: Polietileno (PE)

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Bolsa individual de polietileno no estéril (PE)

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

Clase: IIa

Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.









© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. TDS Bubble Humidifier non Prefilled ES01