

DERMABOND*

Adhesivo Tisular



DERMABOND*

Adhesivo Tisular

DERMABOND* es un adhesivo tópico para la piel, estéril, que contiene una formulación monomérica (2 octil cianocrilato) y el colorante D y C Violeta # 2. Se presenta en aplicador de uso único empacado en un envase de burbuja. Al aplicarse a la piel, el líquido adhesivo es ligeramente más viscoso que el agua y polimeriza en minutos.

Indicaciones

DERMABOND* está diseñado para aplicación tópica, únicamente para mantener aproximados los bordes de la piel de heridas de incisiones quirúrgicas, incluyendo punciones de cirugía de invasión mínima, y laceraciones simples por traumatismos, en las que se ha llevado a cabo limpieza completa. DERMABOND puede usarse en combinación con, pero no en lugar de suturas subcutáneas.

Presentación

DERMABOND* viene en un aplicador estéril prellenado, de uso único. Está disponible en las siguientes presentaciones: **DERMABOND ALTA VISCOSIDAD, DERMABOND MINI, DERMABOND PROPEN Y DERMABOND PROPEN XL**. El aplicador esta disponible en 0.25 ml, 0.50 ml y 0.75 ml de líquido adhesivo. El aplicador está empacado en envase de **burbuja** para mantenerlo estéril hasta que se abra o dañe. DERMABOND está disponible en cajas de 6 o 12 ampollas, según su presentación.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento recomendadas: por debajo de 30° C (86° F) lejos de la humedad y el calor directo. No usar después de la fecha de vencimiento.

Esterilidad

DERMABOND* se esteriliza originalmente con calor seco y gas óxido de etileno. No reesterilizar. No usar si el empaque está abierto o dañado. Desechar cualquier material no usado después de terminar el procedimiento médico.

DERMABOND*

2-Octil Cianoacrilato

Adhesivos

DERMABOND*

Código	Descripción	Tamaño	Ctd./Caja
AHV12	DERMABOND* ALTA VISCOSIDAD Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) -Alta Viscosidad	0.5 ml	12
AHVM12	DERMABOND* MINI (2-Octil Cianoacrilato) -Alta Viscosidad	0.36 ml	12
APP6	DERMABOND* PROPEN Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) -Alta Viscosidad -Aplicador Propen	0.5 ml	6
APPXL6	DERMABOND* PROPEN XL Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) -Alta Viscosidad -Aplicador Propen	0.75 ml	6