

# RECARGA PARA GRAPADORA ECHELON 45 GST45G\*

Recarga para grapadora ECHELON 45 tejido verde con tecnología de superficie antideslizante de tejido



**NOTA** imagen de referencia para más información remitirse a la tabla de códigos

| CODIGO | DESCRIPCIÓN                        | CODIGO DE COLOR | ALTURA DE GRAPA |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| GST45G | Recarga de 45mm para tejido grueso | Verde           | 2.0mm           |

## INFORMACIÓN GENERAL

### Descripción

Recarga para Endo grapadora lineal cortante ECHELON GST \* con superficie de agarre de tejido

### Materia Prima

Plástico, metal

### Grapas:

aleación de titanio

Está indicada para transección, resección o creación de anastomosis. El instrumento tiene aplicación en diversos procedimientos quirúrgicos en el área de cirugía general, gastrointestinal, musculo esquelético, ginecológica, urológica y torácica

### Presentación

Empaque individual

\*según código

### Método de esterilización

Radiación, No reesterilizar

## **Transporte y almacenamiento**

Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez

## **Recomendaciones de uso**

Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar / No reutilizar Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas

## **Precauciones generales**

Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y las técnicas quirúrgicas.

Asegúrese que el tejido que desea grapar este correctamente colocado entre las ramas antes de graparlo

Tenga cuidado de no disparar este instrumento si la línea de grapado puede quedar en tensión

Al colocar la grapadora en el lugar de aplicación compruebe que sobre el lugar no presente obstrucción como clips, catéteres, guías etc. Entre las ramas del instrumento

**\*para ampliar información consultar al manual del usuario**

## **Disposición final**

los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián

Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

## **Vida útil**

5 años

## **Tipo de dispositivo**

Invasivo

## **Riesgo IIB**

**Registro Sanitario** INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1

## **Fabricante**

ETHICON, INC Route 22 WEST P.O. BOX 151, Somerville NJ USA 00876 | ETHICON LLC Highway 183 Km 8,3 San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 154 - JD. DAS INDUSTRIAS SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 122240-908 BRASIL | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS PARA SAÚDE LTDA Avenida presidente Juscelino Kubitschek, N° 2041, ANDARES 8° E 9° Complexo JK. Bloco B - Villa Nova Conceição - São Paulo - SP – BRASIL

## **Titular licencia**

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH

