

FICHA SISTEMA GST POWERED PLUS



Indicaciones: Las familias ENDOPATH ECHELON™ y ECHELON FLEX™ de endocortadoras lineales y recargas están destinadas a la transección, resección y/o creación de anastomosis. Estos instrumentos están indicados para múltiples intervenciones quirúrgicas abiertas o mínimamente invasivas generales, ginecológicas, urológicas, torácicas y pediátricas.

Contraindicaciones: No utilice estos instrumentos en la aorta, en tejido isquémico o necrótico y en tejido sin disponer del control distal y proximal. Debe evaluarse cuidadosamente el espesor del tejido antes de realizar el disparo sobre el mismo.

Descripción: Las endocortadoras lineales articuladas eléctricas Plus ECHELON FLEX se suministran estériles para uso en un solo paciente, cortan y grapan el tejido simultáneamente. Las recargas poseen seis líneas de grapas alternas entre sí, tres a cada lado de la línea de corte.

Los instrumentos eléctricos Plus ECHELON FLEX 60 poseen una línea de grapas cuya longitud es aproximadamente de 60 mm y una línea de corte con una longitud aproximada de 57 mm, los instrumentos se suministran con una batería de litio primaria que debe instalarse antes de su uso, Los instrumentos se suministran sin carga y deben cargarse antes de su uso (un máximo de 12 recargas o disparos por paciente).

Las recargas se comercializan por separado las cuales cuentan con la Tecnología de Superficie de Agarre (Gripping Surface Technology - GST), que le ofrece una superficie rugosa de diseño patentado para proveer un agarre a traumático que mantiene el tejido en su lugar durante el disparo.¹ Una combinación de diseño patentado de Tecnología de Superficie de agarre, componentes internos de recarga fuertes y una geometría de grapas rediseñada para mitigar la cantidad y el efecto de deslizamiento de los tejidos durante el disparo.

Código del Instrumento:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VASTAGO
PSEE60A	Endocortadora lineal articulada eléctrica Plus Echelon Flex 60 mm	340 mm
PLEE60A	Endocortadora lineal articulada eléctrica larga Plus Echelon Flex 60 mm	400 mm

Código de la recarga:

CÓDIGO	LONG ESPIGA	ALTURA GRAPA	LONG RECARGA	COLOR	GRAPAS
GST60W	2.6 mm	1.0 mm	60 mm	Blanca	88
GST60B	3.6 mm	1.5 mm	60 mm	Azul	88
GST60D	3.8 mm	1.8 mm	60 mm	Dorada	88
GST60G	4.1 mm	2.0 mm	60 mm	Verde	88
GST60T	4.2 mm	2.3 mm	60 mm	Negra	88

CODE: NRMRETH6194

©Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2015.

Elaborado en: 04/15. Valido de 04/15 a 04/16.

En Colombia: Johnson & Johnson de Colombia S.A. Calle 94A No 13-72. Bogotá D.C. – Colombia. En Costa Rica: Johnson & Johnson de Costa Rica, S.A. Oficentro La Virgen, Edificio B, Oficina 01. San José, Costa Rica. En Guatemala: Johnson & Johnson Guatemala, S.A. 26 Avenida 5-90 Zona 11. Plaza Vía Majadas, 2do. Nivel Local No. 201. Parque Comercial Las Majadas Guatemala Ciudad 01011 - Guatemala - Guatemala.. En Panama: Ethnor del Istmo, S.A. Complejo Business Park, entre Ave La Rotonda y Ave Principal, Edificio Sur, Piso 1, Costa del Este. Republic of Panamá – Panamá. PO Box 0835-00241. En Puerto Rico: Johnson & Johnson Medical Caribbean. Suite 200. 475 Calle C. Guaynabo, PR 00969. En República Dominicana: Johnson & Johnson Republica Dominicana. Ave. John Kennedy #10. Edificio Perellano y Herrera. 3er. Piso, Sector Miraflores.