

RECARGA PARA GRAPADORA ECHELON 60 GST60G*

Recarga para grapadora ECHELON 60 tejido grueso con tecnología de superficie antideslizante de tejido



NOTA imagen de referencia para más información remitirse a la tabla de códigos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE COLOR	ALTURA DE GRAPA
GST60G	Recarga de 60mm para tejido grueso	verde	2.0mm

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Recarga para Endo grapadora lineal cortante ECHELON GST * con superficie de agarre de tejido

Materia Prima

Plástico, metal

Grapas:

aleación de titanio

Está indicada para transección, resección o creación de anastomosis. El instrumento tiene aplicación en diversos procedimientos quirúrgicos en el área de cirugía general, gastrointestinal, musculo esquelético, ginecológica, urológica y torácica

Presentación

Empaque individual

*según código

Método de esterilización

Radiación, No reesterilizar

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez

Recomendaciones de uso

Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar / No reutilizar Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas

Precauciones generales

Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y las técnicas quirúrgicas.

Asegúrese que el tejido que desea grapar este correctamente colocado entre las ramas antes de graparlo

Tenga cuidado de no disparar este instrumento si la línea de grapado puede quedar en tensión

Al colocar la grapadora en el lugar de aplicación compruebe que sobre el lugar no presente obstrucción como clips, catéteres, guías etc. Entre las ramas del instrumento

***para ampliar información consultar al manual del usuario**

Disposición final

los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián

Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

Vida útil

5 años

Tipo de dispositivo

Invasivo

Riesgo IIB

Registro Sanitario INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1

Fabricante

ETHICON, INC Route 22 WEST P.O. BOX 151, Somerville NJ USA 00876 | ETHICON LLC Highway 183 Km 8,3 San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 154 - JD. DAS INDUSTRIAS SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 122240-908 BRASIL | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS PARA SAÚDE LTDA Avenida presidente Juscelino Kubitschek, N° 2041, ANDARES 8° E 9° Complexo JK. Bloco B - Villa Nova Conceição - São Paulo - SP – BRASIL

Titular licencia

JOHNSON & JOHNSON ,MEDTECH