

FECHA TECNICA Echelon Flextm POWERED VASCULAR

Indicaciones:

La endograpadora eléctrica Echelon Flextm con punta de posicionamiento avanzada y sus recargas están destinadas a la transección y resección de tejidos vasculares indicados para procedimientos abiertos y mínimamente invasivos en Cirugía General, Ginecología, Urología, Torácica y Pediátrica.

Contraindicaciones:

No utilice estos instrumentos en la aorta, en tejido isquémico o necrótico y en tejido sin disponer del control distal y proximal. Debe evaluarse cuidadosamente el espesor del tejido antes de realizar el disparo sobre el mismo.

Descripción del producto:

La endocortadora eléctrica con punta de posicionamiento avanzado Echelon Flextm **POWERED VASCULAR RECARGA VASCULAR** de 35 mm, son dispositivos estériles para un solo paciente que corta y grapa el tejido simultáneamente

Las recargas incluyen cuatro filas de grapas alternas entre sí: dos a cada lado de la línea de corte. La grapadora vascular eléctrica con punta de colocación avanzada **Echelon Flextm** Y las cargas tienen una línea de grapas de unos 35 mm de largo y una línea de corte de unos 30 mm de largo.

El instrumento se suministra con una pila de litio primaria que debe instalarse antes de su uso.

El instrumento se suministra sin carga y debe cargarse antes de su uso.

La recarga cuenta con una lámina protectora de grapas que protege sus puntas durante el envío y el transporte, así como durante la instalación de la misma. La característica de bloqueo del instrumento está diseñada para evitar que este se dispare descargado o que se vuelva a disparar una recarga usada o mal instalada.

Atención: No recargue el instrumento más de 12 veces para un máximo de 12 disparos por instrumento.

Componentes del Producto

- ECHELON FLEX™ POWERED VASCULAR Endograpadora con Punta de Posicionamiento Avanzada
- ENDOPATH ECHELON® Recarga Blanca Vascular para Punta de Posicionamiento Avanzada



^{*}El instrumento no contiene una recarga.

CÓDIGO

PVE35A

DESCRIPCIÓN



ENDOPATH ECHELON® Recarga Blanca Vascular para Punta de Posicionamiento Avanzada (35mm, 4 filas)

CÓDIGO C	COLOR	DESCRIPCIÓN	ALTURA DE LA ENDOGRAPADORA ABIERTA	FILAS DE LA ENDOGRAPADORA	ALTURA DE LA ENDOGRAPADORA CERRADA	CANTIDAD POR UNIDAD DE VENTAS
VASECR35 E	Blanco	Recarga Blanca para uso en tejido vascular/	fino 2.5mm	4	1.0mm	12

Póngase en contacto con su Profesional de Ventas ETHICON o viste la página www.ethicon.com para saber más sobre el desempeño de la Endograpadora Echelon Flex™ Powered Vascular y las Recargas Endopath Echelon®.

©Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2015. Elaborado en: 10/15. Valido de 10/15 a 10/16. Johnson & Johnson de Colombia S.A. Calle 94A No 13-72. Bogotá D.C. – Colombia.