

5192++ GENESIS Prótesis de pene maleable

Fabricante

Coloplast A/S

Distribuidor

Coloplast Productos Médicos, S.A.

Clase CE

IIb (regla 8)

Esterilización

Estéril y de un solo uso.

Óxido de Etileno (EO).

No utilizar si el envoltorio estéril está dañado o abierto.

No reesterilizar.

Indicaciones

La prótesis de pene Genesis está diseñada para el manejo de impotencia debida a diferentes causas, incluyendo: epispadias, fractura pélvica, lesión o enfermedad medular, prostatectomía, cistectomía, resección perineal-abdominal, esclerosis múltiple, diabetes, alcoholismo, arteriosclerosis e hipertensión vascular, priapismo y enfermedad de Peyroine. La prótesis también puede ser usada en pacientes concretos con impotencia psicogénica.

Instrucciones de uso: 70002117

Contraindicaciones

La implantación no es aconsejable si hay una infección presente en cualquier parte del cuerpo, especialmente en el tracto urinario o genital. El paciente no debe ser usado en paciente con problemas sin resolver como volumen de orina residual elevado por obstrucción del tracto urinario inferior o vejiga neurógena. El implante se debe usar con precaución en pacientes diabéticos ya que son más susceptibles a la infección y a las complicaciones por infección que los pacientes no diabéticos. Otras contraindicaciones incluyen problemas urinarios no resueltos, cualquier condición que pueda dificultar la actividad sexual (como angina severa), historial de sensibilidad a materiales extraños, cicatrización de la piel comprometida, sistema inmune comprometido, y cualquier anomalía anatómica o psicológica que puede conducir a complicaciones postoperatorias significativas, sin motivación a sufrir cualquier cirugía o revisión posterior e inestabilidad psicológica del paciente.

Caducidad

5 años

Referencias

Tamaño	Referencia	
9,5 cm	519250	91-9509SC
11 cm	519260	91-9511SC
13 cm	519270	91-9513SC

Descripción

La prótesis de pene Genesis se presenta en un kit que contiene:

- 1 par de barras cilíndricas compuestas por una hélice de plata y recubiertas de silicona. El extremo distal acaba en una punta roma y en proximal acaba en recto con un agujero en la base para la conexión de los extensores posteriores. El cilindro está graduado. En su superficie poseen revestimiento hidrofílico.
- 3 pares de extensores posteriores con medidas: 0,5 cm, 1 cm y 2 cm.

Materiales:

La prótesis de pene Genesis está compuesta de silicona, Dacrón, polipropileno y plata con revestimiento hidrofílico.

Contenido en látex: No

Fotografía del producto



Presentación

Unidad de empleo Todos los componentes en una bandeja doble termosellada

Unidad de pedido 1 unidad de empleo en una caja de cartón (mm) 370x160x50