

**DRENAJE A TORAX SUCCION HUMEDA COMPACT SINGLE REF 1015 CODIGO 2258**

## Ficha Técnica Drenaje Torácico Succión Húmeda

**Marca:** **REDAX**

**Modelo:** **COMPACT SINGLE**

**REFERENCIA 10105**

### Descripción:

Sistema de drenaje torácico de 3 cámaras, de un solo uso, para pacientes adultos y pediátricos, provistos de cámaras de recolección, cámara sello de agua y auto-regulado para el control de la aspiración, totalmente libre de látex compatible con RMI. Todos los dispositivos se pueden usar en aspiración o por gravedad, y están disponibles en la versión con tubo simple. Para uso en neonatos se debe solicitar un accesorio que cumple con esta función.

### Características:

- ✓ Sistema de Auto-Regulación, una vez que se conecta a la fuente de vacío, no requiere ninguna regulación adicional.
- ✓ Cámara de sello de Agua para facilitar la detección de pérdidas por burbujeo y obtener una presión intrapleurales precisa en el paciente.
- ✓ Válvula de Control de la Presión Negativa, Sistema simplificado para la liberación de la presión negativa.
- ✓ Válvula de Seguridad Automática para aliviar la presión positiva.
- ✓ Puerto para muestra libre de aguja.
- ✓ Diseño sólido, estable y compacto.
- ✓ Gran capacidad con escala graduada de precisión 2100 c.c. con incrementos de 5 ml hasta 200 ml, lo cual permite su uso en aplicaciones pediátricas.
- ✓ Regulación del burbujeo automática y totalmente integrada.
- ✓ Asa integrada firme para transporte y traslado de pacientes.
- ✓ Diseñada para reducir la mezcla de líquidos en el interior de las cámaras.
- ✓ Tubo de conexión independiente con



conector lock-in.

- ✓ Incluye jeringa para el llenado y un clamp en el tubo de conexión hacia el paciente.
- ✓ Material: POLICARBONATO, POLIESTIRENO SILICONA
- ✓ Válvula exclusiva para neonatos

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea:</b>                      | <b>Drenajes torácicos de succión Húmeda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre técnico:</b>             | Drenaje torácico de tres cámaras, sello de agua, succión húmeda, recolección simple o dual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre comercial</b>            | Drenaje <b>Compact</b> Colección Simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fabricante:</b>                 | REDAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>País origen:</b>                | ITALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Almacenamiento:</b>             | Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riesgo:</b>                     | IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numero de usos:</b>             | De un solo uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicaciones</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Facilitar la remoción de líquido, sangre y/o aire del espacio pleural o el mediastino.</li> <li>✓ Evitar la entrada de aire atmosférico en el espacio pleural mediante el uso de una trampa de agua.</li> <li>✓ Restaurar la presión negativa del espacio pleural.</li> <li>✓ Promover la re-expansión del pulmón colapsado mejorando su ventilación y perfusión.</li> <li>✓ Aliviar la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Advertencias y Precauciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El sistema de drenaje debe mantenerse en posición vertical y siempre por debajo del nivel del líquido en la cavidad pleural (por lo menos 50 cm).</li> <li>✓ Evitar curvaturas o aplastamientos en el tubo de drenaje del paciente.</li> <li>✓ No obstruir ni cubrir la válvula de liberación de presión positiva.</li> <li>✓ No conectar el sistema al paciente con el vacío ya activado.</li> <li>✓ No pinzar el tubo de conexión al paciente durante un periodo prolongado durante el drenaje y/o el transporte.</li> <li>✓ El líquido contenido en las cámaras de recolección del sistema de drenaje no se debe re-infundir de ningún modo, sino que debe eliminarse con el sistema de drenaje de conformidad con las normativas vigentes en materia de residuos biológicos peligrosos.</li> <li>✓ En caso de conexión a aspirador, vigilar que haya burbujeo en la cámara de control de aspiración o que se vea el fuelle rojo en la posición adecuada.</li> </ul> |
| <b>Registro sanitario INVIMA:</b>  | 2020DM-0021059 ;<br>Vence Enero 13 - 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Presentación:</b>               | Caja x 4 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad:</b>               | 2100cc                                                |
| <b>Método de esterilización</b> | Óxido de etileno                                      |
| <b>Disposición final:</b>       | De acuerdo al protocolo de desecho de la institución. |