


Ficha Técnica

Malla de Polipropileno Standard Monofilamento

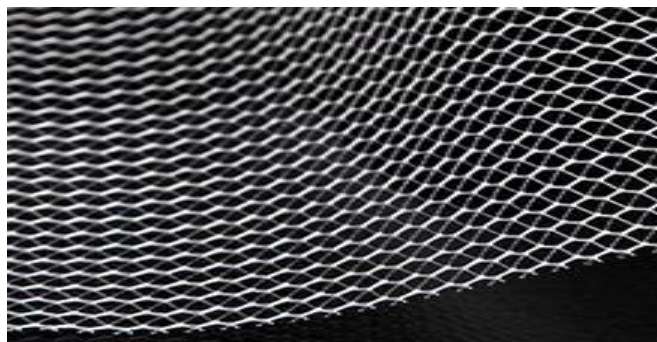

La Malla de Polipropileno **VUP MEDCAL** está elaborada monofilamento de peso promedio por unidad de superficie es de 50gr/m², es una malla cuadrada, transparente, entretejida con poro de 1,5mm, lo que la hace altamente resistente a la fuerza tensil, con menor acortamiento, no posee memoria plástica, permite ser cortada en cualquier dirección sin riesgo de deshilacharse; es delgada (grosor 0,43mm). Adecuada para su aplicación en una hernioplastia inguinal "abierta" (técnica de Lichtenstein). También se recomienda en el reemplazo completo de estructuras aponeuróticas de la pared abdominal (por ejemplo, en el caso de grandes hernias ventrales) y resiste con seguridad a las presiones a las que está sometida la pared abdominal. Otras aplicaciones incluyen: métodos laparoscópicos **TEP y TAPP** y la colocación sublay. Si el defecto es de hasta 3-4 mm (observar suficiente superposición de los bordes del defecto – hasta 10mm).

Para los métodos **TEP/TAPP**: colocar la malla enrollada. Se recomienda usar trocar de 10mm en adelante

Las Mallas **VUP Medical** se elabora de acuerdo a las indicaciones de las Sociedades de Herinas (Europea, Americana) de dar preferencia a mallas planas, ligeras y macroporosas



Nombre técnico:	MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO SATANDARD
Nombre comercial	MALLA DE REPARACION EN POLIPROPILENO MONOFILAMENETO STANDARD VUP
Fabricante:	VUP MEDICAL
País origen:	REPUBLICA CHECA
Almacenamiento:	La MALLA DE REPARACION EN POLIPROPILENO STANDARD de deben conservarse en un lugar limpio y seco, no deben exponerse a la luz solar directa ni someterse a calor excesivo.
Riesgo:	IIB
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	La MALLA DE REPARACION EN POLIPROPILENO STANDARD , está adecuada para su aplicación en una hernioplastia inguinal "abierta" (técnica de Lichtenstein). Se recomienda observar los principios de la técnica operatoria de Lichtenstein un grado apropiado de preparación, un tamaño de malla suficiente, que garantice una superposición de los bordes del defecto, un tipo adecuado de fijación de malla. Se recomienda que las suturas de fijación penetren la malla al menos a 10 mm del borde de la malla. Puede ser utilizada por método de LAPAROSCOPICOS como TEP y TAPP
Precauciones	✓ No use el producto si hay señales de daño aparente en el empaque o en el dispositivo ✓ El usuario debe ser un médico que esté familiarizado con las técnicas y procedimientos quirúrgicos.
Registro sanitario INVIMA:	2021DM-2021DM-0024220 Vigencia: 13 Sep. 2031
Presentación:	Unidad
Método de esterilización	La MALLA DE REPARACION EN POLIPROPILENO STANDARD se suministra estéril y están indicados para uso único. Se esterilizan mediante el método de Óxido de Etileno.

Referencias de Producto

Size (cm)	Catalogue code
6x11	091-1106
15x10	091-1510
15x15	091-1515
20x15	091-2015
30x15	091-3015
30x30	091-3030