

STENT AORTICO


ADVANTA 12mm X 29mm X 120 cm REF 85379

ADVANTA 12mm X 41mm X 120cm REF 85380

ADVANTA 12mm X 61mm X 120cm REF 85381

CODIGO 101196

FICHA TECNICA STENT VASCULAR PERIFERICO ENCAPSULADO EN PTFE, PREMONTADO EN BALON.

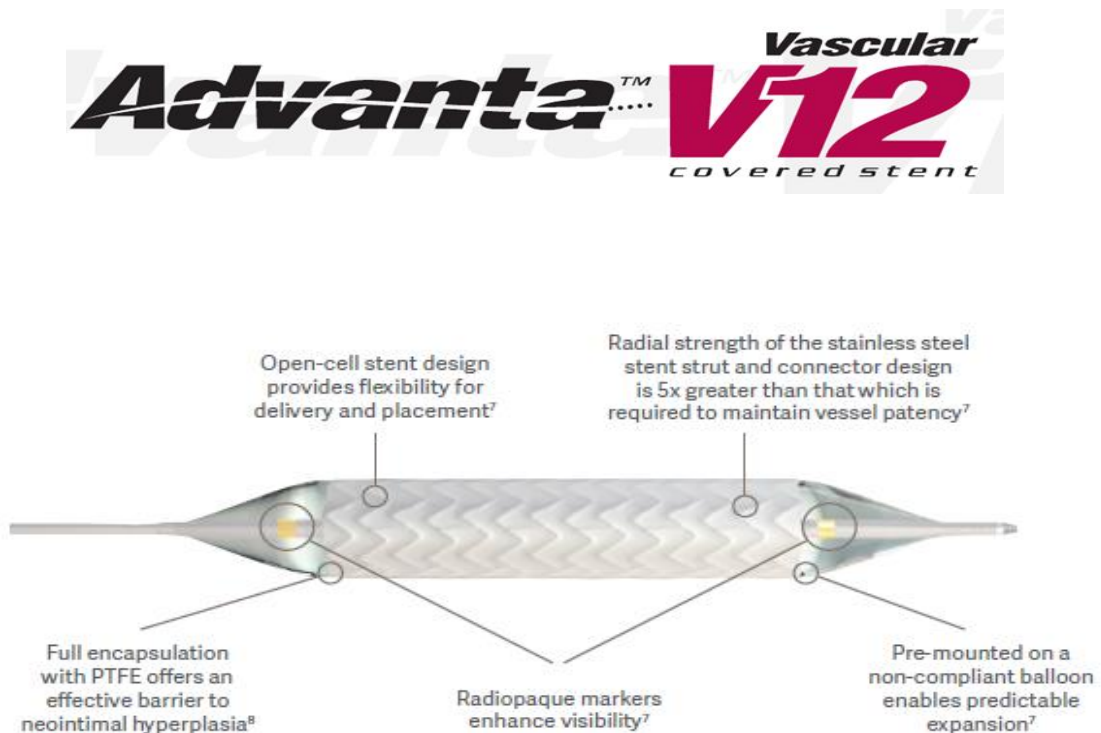

El stent Advanta V-12 es un stent de acero inoxidable de 316L, completamente encapsulado en PTFE patentado, que limita el crecimiento celular interno con el fin de ayudar a minimizar la respuesta de hiperplasia intimal, contribuye a disminuir el daño a la pared del vaso gracias a su encapsulación total, con una tecnología patentada de fluoropolimero que



responde a la temperatura corporal.

El stent es premontado en balón con un bajo perfil, fácil de implantar, con una excelente navegabilidad que permite llegar a sitios aún con anatomías muy tortuosas, permite post-dilatarse y adaptarse a la anatomía del paciente, atrapa el debri embólico durante su liberación, debido a la apertura del balón en forma de hueso de perro, la liberación es rápida y precisa en un solo paso, compatible con guía ,0035", los diámetros van de 5mm a 10mm son post-dilatables hasta 12mm, y los diámetros de 12 mm son post-dilatables hasta 16mm.

Línea:	Stent Vasculares Recubiertos
Nombre técnico:	Stent Vascular encapsulado en PTFE, premontado en balón
Nombre comercial	Advanta V-12
Fabricante:	ATRIUM MAQUET
País origen:	U.S.A.
Almacenamiento:	Temperatura ambiente
Riesgo:	III
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	El stent cubierto Advanta V12 está indicado para restaurar y mejorar la permeabilidad de las arterias ilíacas y renales. • Cuando no es posible acceder al sitio con técnicas de colocación estándar • Pacientes con antecedentes de trastornos de la coagulación • Pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación o terapia anti plaquetaria. • Pacientes con contraindicaciones para la medicación necesaria • Lesiones muy calcificadas resistentes al TPLA • Lesiones en vasos colaterales o adyacentes a ellos • Lesiones en lugares sujetos a compresión externa • Aneurismas adyacentes al sitio de implantación del stent • Estenosis distal al sitio de implantación del stent • Formación de trombos frescos
Contraindicaciones:	
Efectos Adversos Potenciales:	Los efectos adversos potenciales incluyen, pero no se limitan a: • Absceso • Arritmia

- Fistulas Arteriovenosas
- Sangrado o hematoma en el lugar de la punción
- Muerte
- Endocarditis
- Hipotensión
- Implantación inadecuada o traumatismo de la íntima
- Lesión, disección, perforación o ruptura del vaso
- Desarrollo tardío de pseudo-aneurisma en el sitio de cateterismo
- Reacción Pirogénica
- Sepsis / infección
- Deterioro hemodinámico a corto plazo
- Desplazamiento, migración o deformación del stent
- Embolización sistémica o episodios trombo-embólicos
- Trombosis Vascular

**Registro sanitario
INVIMA:**

2014DM-0002544 R1 ,
VENCE JULIO 1 DE 2024


Presentación:

Unidad, empaque sellado estéril

**Método de
esterilización**

Óxido de etileno

Specifications

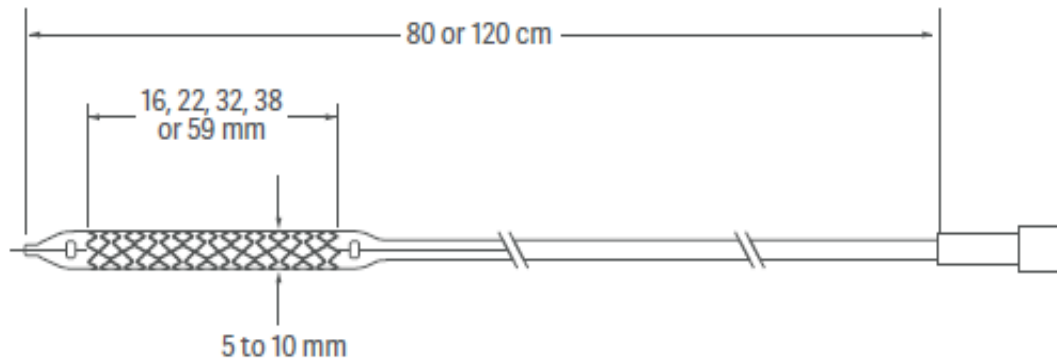

Advanta V12 5-10 mm, .035" Guidewire

Stent Diameter/Length	Order Number 80 cm Catheter Length	Order Number 120 cm Catheter Length	Foreshortened Length		Stent Post Deployment Outer Diameter		Expanded Balloon Outer Diameter		Introducer Compatibility
			8 ATM Nominal Pressure	12 ATM Rated Burst Pressure	8 ATM Nominal Pressure	12 ATM Rated Burst Pressure	8 ATM Nominal Pressure	12 ATM Rated Burst Pressure	
5 x 16 mm	85340	85350	15.9 mm	15.6 mm	4.9 mm	5.2 mm	5.1 mm	5.3 mm	6 Fr
5 x 22 mm	85341	85351	21.3 mm	21.0 mm	4.9 mm	5.2 mm	5.1 mm	5.3 mm	6 Fr
5 x 32 mm	85388	85394	32.3 mm	32.3 mm	5.0 mm	5.3 mm	5.1 mm	5.3 mm	7 Fr
5 x 38 mm	85320	85330	37.2 mm	37.7 mm	5.1 mm	5.3 mm	5.1 mm	5.3 mm	7 Fr
5 x 59 mm	85321	85331	58.6 mm	60.0 mm	5.0 mm	5.3 mm	5.1 mm	5.3 mm	7 Fr
6 x 16 mm	85342	85352	15.7 mm	15.1 mm	5.7 mm	6.2 mm	6.1 mm	6.3 mm	6 Fr
6 x 22 mm	85343	85353	20.8 mm	20.2 mm	5.8 mm	6.2 mm	6.1 mm	6.3 mm	6 Fr
6 x 32 mm	85389	85395	31.7 mm	31.5 mm	5.9 mm	6.3 mm	6.1 mm	6.3 mm	7 Fr
6 x 38 mm	85322	85332	36.6 mm	37.0 mm	6.0 mm	6.3 mm	6.1 mm	6.3 mm	7 Fr
6 x 59 mm	85323	85333	57.8 mm	58.7 mm	6.0 mm	6.3 mm	6.1 mm	6.3 mm	7 Fr
7 x 16 mm	85344	85354	15.0 mm	14.2 mm	6.9 mm	7.3 mm	7.1 mm	7.3 mm	7 Fr
7 x 22 mm	85345	85355	20.1 mm	19.4 mm	6.9 mm	7.3 mm	7.1 mm	7.3 mm	7 Fr
7 x 32 mm	85390	85396	31.3 mm	31.2 mm	6.9 mm	7.3 mm	7.1 mm	7.3 mm	7 Fr
7 x 38 mm	85324	85334	35.8 mm	35.7 mm	6.9 mm	7.3 mm	7.1 mm	7.3 mm	7 Fr
7 x 59 mm	85325	85335	57.1 mm	57.5 mm	7.0 mm	7.3 mm	7.1 mm	7.3 mm	7 Fr
8 x 32 mm	85391	85397	30.0 mm	29.6 mm	7.9 mm	8.4 mm	8.2 mm	8.5 mm	7 Fr
8 x 38 mm	85326	85336	34.7 mm	34.7 mm	8.1 mm	8.5 mm	8.2 mm	8.5 mm	7 Fr
8 x 59 mm	85327	85337	56.0 mm	56.5 mm	8.0 mm	8.4 mm	8.2 mm	8.5 mm	7 Fr
9 x 32 mm	85392	85398	28.7 mm	29.2 mm	8.9 mm	9.3 mm	9.1 mm	9.4 mm	7 Fr
9 x 38 mm	85328	85338	33.7 mm	32.7 mm	8.9 mm	9.3 mm	9.1 mm	9.4 mm	7 Fr
9 x 59 mm	85329	85339	54.6 mm	54.0 mm	8.9 mm	9.3 mm	9.1 mm	9.4 mm	7 Fr
10 x 38 mm	85360	85364	30.8 mm	30.9 mm	10.0 mm	10.4 mm	10.2 mm	10.5 mm	7 Fr
10 x 59 mm	85361	85365	53.3 mm	52.5 mm	9.9 mm	10.3 mm	10.2 mm	10.5 mm	7 Fr

