

CODIGO 406128 INJERTO VASCULAR PTFE CONICO ANILLADO 4-7mm X 60cm

Ficha Técnica Injertos Vasculares PTFE AVATAR LISOS ANILLADOS, CONICOS

Marca: **AVATAR**


Descripción:

Los injertos en **PTFE** marca **AVATAR** están elaborados en Politetracloruro expandido (ePTFE), es un polímero completamente fluorado, que tiene atributos de excelente resistencia química, estabilidad a altas temperaturas y buenas propiedades antiadherentes. Es un material lubricante extremadamente inerte y, después de más de 30 años de uso, como vaso sanguíneo artificial, sigue siendo el estándar predilecto de elección para los sustitutos sintéticos. Los injertos vasculares se pueden usar para derivar o reemplazar venas y arterias enfermas o dañadas. Los injertos de **PTFE** suelen ser muy porosas en las capas externas, lo que permite el crecimiento del tejido favoreciendo su biocompatibilidad y rápida incorporación al cuerpo lo que les ha permitido continuar dominando el acceso arteriovenoso.

Características:

Los injertos en PTFE marca **AVATAR** están elaborados en Politetracloruro expandido (ePTFE), disponibles en una variedad de configuraciones, que van desde las presentaciones lisas, cónicas o escalonadas, con refuerzo anillado externo o espiralado.

Los injertos **AVATAR** con anillo externo son de gran utilidad por sus aplicaciones donde se requiere alta resistencia al kinking o al colapso; altamente útiles en procedimientos como Axilofemorales, Axilobifemoral, y Femoral-Femoral

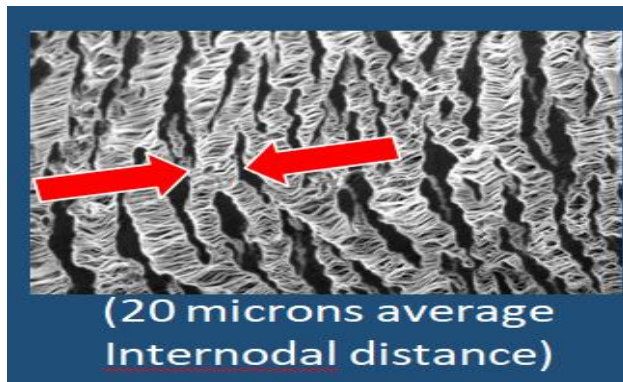

Línea:	Vascular - Injerto de PTFE MARCA AVATAR
Nombre técnico:	Injertos y/o Prótesis Vasculares para Reemplazo de Vasos Periféricos y/o Aórtico en PTFE.
Nombre comercial	Injerto Vascular PTFE anillados lisos y cónicos AVATAR
Fabricante:	BIOVIC SDN.BHN
País origen:	MALASIA
Almacenamiento:	Los injertos en PTFE AVATAR deben conservarse en un lugar limpio y seco, no deben exponerse a la luz solar directa ni someterse a calor excesivo.
Riesgo:	III
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	La configuración Regular o Lisa (STANDARD) del injerto AVATAR está indicada en reparaciones , bypass , y acceso artero –venoso La configuración de <u>Espiral completa</u> del injerto AVATAR, está indicada en reparaciones bypass y al acceso artero –venoso donde se requiere resistencia a el kinqueo o al colapso. La configuración con <u>Anillo terminal</u> del injerto AVATAR, está indicada en reparaciones y bypass, acceso artero –venoso en donde se requiere resistencia en una sola área. La configuración con <u>Escalonada</u> del injerto AVATAR se recomienda cuando se requiere hacer match, con el vaso del paciente con mínima resistencia al kinqueo y la compresión. La configuración con <u>Escalonada anillada</u> del injerto AVATAR se recomienda cuando se requiere hacer match, con el vaso del paciente en áreas con alta riesgo al kinqueo y la compresión. También se recomienda la prótesis para uso en pacientes que requieren heparinización sistémica antes o durante la cirugía.
Contraindicaciones	No utilizar en pacientes que presentan infección.
Precauciones	✓ NO PRE-COAGULAR. ✓ ESTÉRIL, NO REESTERILIZAR, USO INDIVIDUAL SOLAMENTE. ✓ Posibles efectos adversos: sangrado, trombosis, embolia, infección del injerto incluso con el uso adecuado de dispositivos médicos. En consecuencia; este dispositivo solo debe ser utilizado por personas calificadas en los procedimientos para los que está indicado.

Registro sanitario INVIMA:	2023DM-0027138
Presentación:	Unidad
Método de esterilización	Los injertos de AVATAR se suministran estériles y están indicados para uso único. Se esterilizan mediante el método de esterilización con gas de Óxido de etileno. No se pueden volver a esterilizar

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PVGFRG0520	INJERTO VASCULAR DE PTFE LISO MARCA AVATAR 5mm X 20cm
PVGFRG0620	INJERTO VASCULAR DE PTFE LISO MARCA AVATAR 6mm x 20 cm
PVGFRG0545	INJERTO VASCULAR DE PTFE LISO MARCA AVATAR 5mm x 45 cm
PVGFRG0645	INJERTO VASCULAR DE PTFE LISO MARCA AVATAR 6mm x 45 cm
PVGCH0545	INJERTO VASCULAR DE PTFEA ANILLO CENTRAL NO REMOVIBLE MARCA AVATAR 5mm x 45 cm
PVGCH0645	INJERTO VASCULAR DE PTFEA NILLO CENTRAL NO REMOVIBLE MARCA AVATAR 6mm x 45 cm
PVGFH0560	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATARDE 5MM DE ANILLO COMPLETO (60CM)
PVGFH0575	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATARDE 5MM DE ANILLO COMPLETO (75CM)
PVGFH0620	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 6MM DE ANILLO COMPLETO (20CM)
PVGFH0645	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 6MM DE ANILLO COMPLETA (45CM)
PVGFH0660	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 6MM DE ANILLO COMPLETO (60CM)
PVGFH0675	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATARDE 6MM DE ANILLO COMPLETO (75CM)
PVGFH0720	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATARDE 7MM DE ANILLO COMPLETO (20CM)
PVGFH0745	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 7MM DE ANILLO COMPLETO (45CM)

PVGFH0760	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 7MM DE ANILLO COMPLETO (60CM)
PVGFH0775	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 7MM DE ANILLO COMPLETO (75CM)
PVGFH0820	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 8MM DE ANILLO COMPLETO (20CM)
PVGFH0845	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 8MM ANILLO COMPLETO (45CM)
PVGFH0860	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 8MM ANILLO COMPLETO (60CM)
PVGFH0875	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 8MM ANILLO COMPLETO (75CM)
PVGST4645	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-6 MM CÓNICO ESCALONADO (45 CM)
PVGST4745	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-7 MM CÓNICO ESCALONADO (45 CM)
PVGSC4645	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-6 MM CÓNICO ESCALONADO – ANILLO CENTRAL (45 CM)
PVGSC4745	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-7 MM CÓNICO ESCALONADO – ANILLO CENTRAL (45 CM)
PVGTA4645	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-6 MM CÓNICO (45 CM)
PVGTA4745	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4 - 7 MM CÓNICO (45 CM)
PVGTA4660	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-6 MM CÓNICO (60 CM)
PVGTA4760	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-7 MM CÓNICO (60 CM)
PVGTH4645	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-6 MM CÓNICO – ANILLADO (45 CM)
PVGTH4745	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-7 MM CÓNICO-HÉLICE (45 CM)
PVGTH4660	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-6 MM CÓNICO - HÉLICE (60 CM)
PVGTH4760	INJERTO VASCULAR DE PTFE AVATAR DE 4-7 MM CÓNICO - HÉLICE (60 CM)

