

CODIGO 406153 INJERTO DACRON RECTO 10mm X 30cm

Ficha Técnica Injertos/Prótesis Vasculares Dacrón Knited Rectas – Bifurcadas –

Marca: **VUP MEDICAL**Modelo: **Injerto Recto y Bifurcado tipo Knitted, con Colágeno**

Descripción:

Esta prótesis vascular rizada tejida tricotada o **Knited** está hecha de hilo de filamento de poliéster utilizando una tecnología de tejido de urdimbre. La pared frontal de la prótesis está provista de una línea de guía de color que facilita al cirujano conocer su camino en la herida quirúrgica durante la implantación.

Cuenta con una capa continua de colágeno bovino modificado químicamente tipo I en la superficie que ayuda a la neoendotelización y sellado de la prótesis. No necesita pre-coagulación.

Por ser tejido **KNITTED** Facilita el crecimiento del tejido en el implante de la pared de la prótesis siendo altamente compatible.

Por su suavidad, diseño de tejido esta indicado para uso en el reparo o substitución de las arterias afectadas por aneurismas o enfermedades oclusivas de la Aorta.

Pueden ser empleadas en las regiones arto-femoral e ileo-femoral en la porción femoro-poplitea superpuesta a la articulación femoro-tibial,


Es muy útil también para accesos de cánulas de perfusión o puentes durante una cirugía. Para esto también puede



contar con los injertos en Dacrón **VUP MEDICAL** anillados de 8mm y 9mm x 50cm.

Características:

- ✓ La prótesis **VUP MEDICAL** se usa directamente, sin preparación antes de la implantación.
- ✓ La prótesis **VUP MEDICAL** es fuerte, elástica, fácil de perforar y no se deshilacha.
- ✓ La pared del injerto **VUP MEDICAL** está provista de una línea de guía de color oscuro para posicionamiento durante la cirugía.
- ✓ La permeabilidad del Injerto **VUP MEDICAL** al agua es 0-5 ml.cm⁻² .min⁻¹
- ✓ La prótesis **VUP MEDICAL** es suministrado en embalaje unitario estéril.
- ✓ La prótesis **VUP MEDICAL** esterilizado por irradiación
- ✓ La prótesis **VUP MEDICAL** tiene plazo de vencimiento es de 3 años

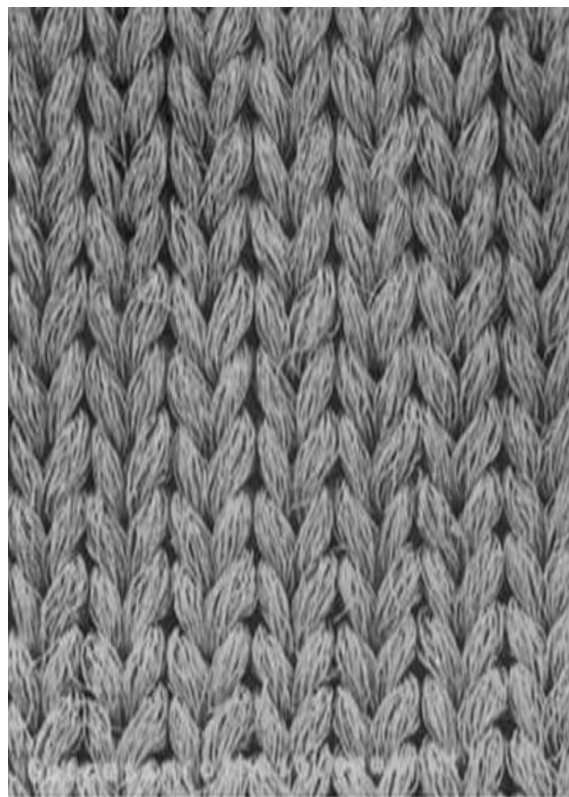

Tejido KNITTED - Tricotado

Línea: Vascular	
Nombre técnico:	Injerto/Prótesis Vascular Dacrón tipo knited con Colágeno
Nombre comercial	Injerto/Prótesis vascular Dacrón Knitted
Fabricante:	VUP Medical
País origen:	Republica Checa
Almacenamiento:	Temperatura ambiente- lejos de la acción del sol
Riesgo:	III
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	Las prótesis vasculares en tejido de punto (Knited), están indicadas para todo tipo de reconstrucción de arterias, en las que es adecuada la aplicación de un injerto vascular de la luz correspondiente. Es muy útil también para accesos de cánulas de perfusión o puentes durante una cirugía. Pueden ser empleadas en las regiones arto-femoral e ileo-femoral En la porción femoro-poplitea superpuesta a la articulación femoro-tibial. En caso de presentarse algunas pequeñas salidas de sangre de la zona de anastomosis o si la sangre se filtra a través de la pared de la

	prótesis, es posible realizar - al mismo tiempo que se neutraliza la heparina – la aplicación de compresas de gasa, previamente sumergidas en solución salina a temperatura corporal.
Contraindicaciones	No usar en personas evidenciamente alérgicas a las proteínas de origen bovino. En circunstancias de riesgo de Infección. En Pacientes pediátricos se deben usar previa revisión individual.
Precauciones:	En el caso de uso de cirugía Cardiovascular de la aorta ascendente, se debe tener precaución, <u>INFORMAR PREVIAMENTE AL CIRUJANO QUE ES UN TEJIDO KNITED</u> , para tomar las medidas pertinentes. Utilice pinzas recubiertas para manipular el injerto y no lo estire. Al realizar la anastomosis, use puntos de sutura no absorbibles, monofilicos y atraumáticos, destinados a cirugía arterial. Está prohibido reesterilizar el injerto.
Registro sanitario INVIMA:	2021DM-002299 VENCE 23 FEB- 2031
Certificación Europea - CE	1434
Presentación:	Caja x Unidad
Método de Esterilización	Radiación- solo en el envase inalterado permanece estéril el producto
Disposición final:	N/A



FAKULTNÍ
NEMOCNICE
U SV. ANNY
V BRNĚ





Injerto vascular tejido de punto con colágeno Ra K

Tabla de dimensiones y referencias:

Injertos rectos Ra lv K



Diámetro (mm)	Referencia - longitud 300 mm	Referencia - longitud 500 mm
6	022-06/300	022-0062
7	022-07/300	022-0072
8	022-08/300	022-0082
9	022-09/300	022-0092
10	022-10/300	022-0102
12	022-12/300	022-0122
14	022-14/300	022-0142
16	022-16/300	022-0162
18	022-18/300	022-0182
20	022-20/300	022-0202
22	022-22/300	022-0222
24	022-24/300	022-0242
25	022-25/300	022-0252
26	022-26/300	022-0262
28	022-28/300	022-0282
30	022-30/300	022-0302
32	022-32/300	022-0322

Injertos bifurcados Ra bv K



Diámetro (mm)	Referencia - longitud 400 mm
6 / 12	024-0612
7 / 14	024-0714
8 / 16	024-0816
9 / 18	024-0918
10 / 20	024-1020
11 / 22	024-1122

Se fabrican otras longitudes a petición del cliente.

