

SISTEMA PARA OSTOMIA DE DOS PIEZAS NEW IMAGE - HOLLISTER

Barrera Cutánea Convexa para Ostomía de 2 piezas New Image

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Barrera cutánea convexa para ostomía (colostomía - ileostomía - urostomía) y fístula.

Descripción:

Barrera cutánea convexa, adhesiva de hidrocoloide con borde microporo, con aro flotante, sintética, transpirable recortable a la medida del estoma.



Función:

- ❖ Protege la piel periestomal del efluente procedente del estoma.
- ❖ Protege la piel alrededor de las fístulas cuando hay presencia de éstas.
- ❖ Es de bajo perfil, altamente flexible, absorbente, durable y permite transpiración.
- ❖ Se amolda al contorno de la piel, garantizando movilidad, elasticidad, confort y seguridad.
- ❖ Tiene una convexidad moderada, indicada para estomas planos, menores de 2 cm de altura ó estomas retraídos y fístulas.
- ❖ Ejerce presión en la piel periestomal y en la piel alrededor de las fístulas, para lograr que éstos sobresalgan de la pared abdominal, evitando la filtración del efluente por debajo de la barrera.
- ❖ El Aro flotante está indicado para evitar presionar la región abdominal al ensamblar la bolsa, brindando confort y seguridad.

Componentes:

- ❖ Hidrocoloides: Pectina
Carboximetilcelulosa Sódica
Gelatina
- ❖ Polímeros: Poliisobutileno (PIB) - Kraton
Estireno-Isopropeno-Estireno (SIS)

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso.
- ❖ Reutilizar la barrera, puede crear riesgos para el usuario, como mala adhesión, olor o fugas, ocasionando lesiones de piel, sarpullido, irritación o eritema.
- ❖ Para garantizar una adherencia adecuada, coloque la barrera sobre la piel limpia, seca e intacta. No utilice aceites, cremas o lociones, estos productos interfieren en la adherencia de la barrera.
El ajuste adecuado de la barrera se puede ver afectado por factores como la forma del estoma, el efluente del estoma, el estado de la piel y contornos abdominales.
- ❖ En caso de requerirlo, póngase en contacto con un asesor especialista en ostomías.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
13802	BARRERA CUTANEA CONVEXA 44MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 25mm)	7707292241168	CAJA X 5 UD	5 AÑOS
13803	BARRERA CUTANEA CONVEXA 57MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 38mm)	7707292241175	CAJA X 5 UD	5 AÑOS
13804	BARRERA CUTANEA CONVEXA 70MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 51mm)	7707292241182	CAJA X 5 UD	5 AÑOS

SISTEMA PARA OSTOMIA DE DOS PIEZAS NEW IMAGE - HOLLISTER

Barrera Cutánea Convexa para Ostomía de 2 piezas New Image

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo:	No invasivo		
Riesgo:	Riesgo bajo - Clase I		
Empaque:	Primario: empaque individual en polipropileno bioorientado. No estéril.		
	Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.		
Almacenamiento:	Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.		
Temperatura:	Mínima	15°C	Máxima 40°C
Humedad relativa:	Mínima	30%	Máxima 70%
Registro Sanitario:	OSTOMY/ DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA		
	INVIMA 2023DM-0027217 Vence: 23/06/2033		
	REF 13802 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
	REF 13803 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
	REF 13804 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
Titular del registro:	Hollister Incorporated		
Marca:	HOLLISTER		
Forma de desecho:	Incineración		
Importado y distribuido por:	Representaciones J. Nissi S.A.S.		
	Carrera 7 B Bis No. 124 - 50		
	Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084		
	Bogotá, D.C.		
	Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co		