

SISTEMA PARA OSTOMIA DE DOS PIEZAS NEW IMAGE - HOLLISTER

Barrera Cutánea Plana para Ostomía de 2 piezas New Image


FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Barrera cutánea para ostomía (colostomía - ileostomía - urostomía) y fístula.

Descripción:

Barrera cutánea plana flexible, adhesiva de hidrocoloide con borde microporo, con aro flotante, sintética, transpirable recortable a la medida del estoma.

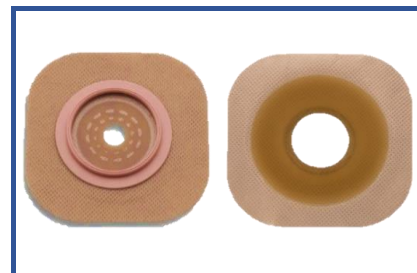

Función:

- ❖ Protege la piel periestomal del efluente procedente del estoma.
- ❖ Protege la piel alrededor de las fístulas cuando hay presencia de éstas.
- ❖ Indicada para personas con estomas de dos centímetros de altura o más y para personas con fístulas al utilizarla con otros accesorios.
- ❖ Es de bajo perfil, altamente flexible, absorbente, durable y permite transpiración.
- ❖ Se amolda al contorno de la piel, garantizando movilidad, elasticidad, confort y seguridad.
- ❖ El Aro flotante está indicado para evitar presionar la región abdominal al ensamblar la bolsa, brindando confort y seguridad.

Componentes:

- ❖ Hidrocoloides: Pectina, Gelatina
Carboximetilcelulosa Sódica
- ❖ Polímeros: Poliisobutileno (PIB)
Estireno-Isopropeno-Estireno (SIS)

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso.
- ❖ Reutilizar la barrera, puede crear riesgos para el usuario, como mala adhesión, olor o fugas, ocasionando lesiones de piel, sarpullido, irritación o eritema.
- ❖ Para garantizar una adherencia adecuada, coloque la barrera sobre la piel limpia, seca e intacta. No utilice aceites, cremas o lociones, estos productos interfieren en la adherencia de la barrera.
El ajuste adecuado de la barrera se puede ver afectado por factores como la forma del estoma, el efluente del estoma, el estado de la piel y contornos abdominales.
- ❖ En caso de requerirlo, póngase en contacto con un asesor especialista en ostomías.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
14602	BARRERA CUTANEA PLANA 44MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 32mm)	7707292240659	CAJA X 5 UD	5 AÑOS
14603	BARRERA CUTANEA PLANA 57MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 44mm)	7707292240666	CAJA X 5 UD	5 AÑOS
14604	BARRERA CUTANEA PLANA 70MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 57mm)	7707292240673	CAJA X 5 UD	5 AÑOS
14606	BARRERA CUTANEA PLANA 102MM PARA OSTOMIA/FISTULA - NEW IMAGE (recortable hasta 89mm)	7707292240680	CAJA X 5 UD	5 AÑOS

SISTEMA PARA OSTOMIA DE DOS PIEZAS NEW IMAGE - HOLLISTER

Barrera Cutánea Plana para Ostomía de 2 piezas New Image

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo:	No invasivo		
Riesgo:	Riesgo bajo - Clase I		
Empaque:	Primario: empaque individual en polipropileno bioorientado. No estéril.		
	Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.		
Almacenamiento:	Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.		
Temperatura:	Mínima	15°C	Máxima 40°C
Humedad relativa:	Mínima	30%	Máxima 70%
Registro Sanitario:	OSTOMY/ DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA		
	INVIMA 2023DM-0027217 Vence: 23/06/2033		
	REF 14602 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
	REF 14603 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
	REF 14604 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
Titular del registro:	REF 14606 BARRERA CUTÁNEA PARA OSTOMÍA DE 2 PIEZAS NEW IMAGE		
	Hollister Incorporated		
Marca:	HOLLISTER		
Forma de desecho:	Incineración		
Importado y distribuido por:	Representaciones J. Nissi S.A.S.		
	Carrera 7 B Bis No. 124 - 50		
	Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084		
	Bogotá, D.C.		
	Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co		