

APLICACIONES	CIDESTERIL es recomendado en Clínicas, Hospitales, Centros Odontológicos y Médicos, IPS, EPS y toda institución donde se quiera aplicar DAN o desinfectar el instrumental.		
MODO DE USO	Agregar el polvo activador al envase que contiene la solución esporicida de CIDESTERIL y agitar hasta que la disolución esté completa. La solución se torna de color azul lo que indica que esta activada y lista para su uso. Lavar muy bien el material para realizar desinfección de alto nivel con un detergente apropiado para eliminar cualquier residuo de suciedad. Sumergir el material dentro de la cubeta con CIDESTERIL, asegurándose que quede totalmente cubierto por la solución. PARA DESINFECTAR: Dejar mínimo 10 minutos dentro de la solución activada. Enjuagar perfectamente con agua destilada. PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL: Dejar mínimo 8 horas. Enjuagar con agua estéril ó con agua destilada preferiblemente.		
INGREDIENTES ACTIVOS	Glutaraldehído al 2%.		
VIDA ÚTIL	2 años sin activar. 30 días Activado.		
PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	La mezcla de CIDESTERIL se mantiene activada durante 30 días. Mantener cubierta la mezcla activada de CIDESTERIL para evitar su contaminación. No dejar por un tiempo mayor del requerido el instrumental dentro de la solución de CIDESTERIL, especialmente objetos de acero al carbono. Evitar el contacto con la piel, mucosas y ojos, en caso tal, enjuagar con abundante agua. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES, TAPABOCAS, GORRO Y GAFAS DE SEGURIDAD.		SGA H301 H315 H317 H331 H334 H335
PRESENTACIÓN	Galón x 4.000mL		
LEGAL	Fabricado para GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN S.A.S. Director Técnico: Ing. Quím. JUAN G. VANEGAS A. CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN INVIMA 20181049036 PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL		
PROPIEDADES	FORMA	Líquido claro	IMÁGEN DE REFERENCIA
	OLOR	Limón	
	COLOR SIN ACTIVAR	Transparente	
	COLOR ACTIVADO	Azul	
	ESPUMA	Ninguno	
	FOSFATOS	Ninguno	
	ESTABLE EN ALMACÉN	24 meses	