



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

West Zymme Ultra
Detergente Enzimático

DESCRIPCIÓN GENERAL

Detergente líquido enzimático que remueve los residuos orgánicos adheridos al instrumental médico quirúrgico y odontológico luego de su uso

REGISTRO Y VIGENCIA

Certificación No Requiere N° 2018006539

ASPECTO

Líquido verde con olor ligeramente alcohólico.

COMPOSICIÓN

Proteasa, carbohidrasa, lipasa, celulasa, tensoactivos, estabilizantes y colorantes.

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

Este producto no presenta propiedades desinfectantes.

VIDA UTIL

2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Su composición cuenta con:
 - o Enzimas especializadas y estabilizadas
 - o Una proteasa especializada en degradar las proteínas de la sangre
 - o Permite eliminar residuos de proteínas, grasas, carbohidratos y estructuras cristalinas de los carbohidratos.

- o Un tensoactivo que permite desprender y solubilizar la carga orgánica adherida al instrumental

- Excelente rendimiento por dosis de uso.

RECOMENDACIONES DE USO

Limpieza de Instrumental quirúrgico.

MODO DE USO

- Diluya entre 7.5 - 10 ml de West Zymme Ultra en un litro de agua. (la dosis varía según el protocolo sugerido para la institución)
- Introduzca los instrumentos en la solución preparada luego de su uso.
- Deje el material en inmersión durante mínimo 3 minutos para eliminar el material orgánico.
- De ser necesario use un cepillo suave.
- Enjuague con abundante agua potable, destilada o estéril, según el protocolo establecido.
- Seque el instrumental y continúe con el proceso de desinfección o esterilización.
- La solución de West Zymme Ultra debe ser reemplazada a diario o cuando se encuentre visiblemente sucia.

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilice los elementos de protección personal durante el proceso de lavado.
- Evite la ingesta o contacto con los ojos.
- No mezcle con otros productos.
- Para más información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros Representantes Técnico Comerciales.

o



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.
- Ingestión:
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, consultar al médico inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- Contacto con la piel
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la irritación persiste consultar al médico.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, y deseche en el contenedor asignado.
- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

PRESENTACIONES

Envase rígido (1Litro, 3.785 Litros)

PARTIDA ARANCELARIA

34.02.20.00.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

