



2 años

Desinfectante líquido para instrumental médico quirúrgico

Producto líquido desinfectante que permite eliminar un amplio espectro de microorganismos del instrumental médico quirúrgico. Su actividad se mantiene por espacio de 28 días

- Amplia acción microbicida
- Duración estimada en 28 días después de activado.
- Indicado para uso en instrumental médico u odontológico y endoscopios flexibles.
- Biodegradable

Colombia: 2009DM-0004019

Costa Rica: EMB-CO-16-00280

República Dominicana: 0924-00003-2017

Desinfección de Instrumental quirúrgico

Líquido incoloro

Glutaraldehído.....2%

La actividad biocida del glutaraldehído resulta de la alquilación de grupos sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo y amino presentes en los microorganismos, que altera el ARN, el ADN y la síntesis de proteínas.

1. Active agregando todo el contenido de la solución activadora al producto.
2. Vierta el producto en una cubeta plástica con tapa.
3. Sumerja el instrumental, previamente lavado, en el desinfectante por espacio de 20 minutos.
4. Retire el instrumental de la cubeta y enjuague con suficiente agua estéril.
5. Seque completamente el instrumental.
6. Descarte el producto luego de 28 días de uso

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto
- No mezclar con otros productos químicos
- Para

<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	10 minutos	99.999%
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		
<i>Aspergillus niger</i> (ATCC 16404)		
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)		
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
 TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
 Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
 A.A. 53179 Medellín
 La Estrella, Antioquia





- Contacto con los ojos

Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste consultar al médico.

Envase rígido (3.785 Litros)

38.08.94.19.00

- Contacto con la piel

Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la irritación persiste consultar al médico.

- Ingestión

No inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula no se debe continuar usando el producto.

- Inhalación

Si presenta síntomas al exponerse al producto trasládese al aire fresco. Si los síntomas persisten consulte un especialista.

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, y deseche en el contenedor asignado.
- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

