



FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

Sanikleen wipes
Paños húmedos para limpieza y desinfección de superficies

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para trabajar como un sistema que absorbe y libera la cantidad necesaria de una solución compuesta de tensoactivos y amonio cuaternario que permiten limpiar y desinfectar superficies en un solo paso, facilitando y reduciendo las actividades del personal de limpieza y previniendo la dispersión de microorganismos causantes de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS).

REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: NSOH05274-16CO Vigente: 30/06/2023

Costa Rica: QH-18-00237 Vigente: 28/02/2023

ASPECTO

Apariencia	Paño blanco
Calidad del paño	Tela no tejida (60g/m ²)
Dimensiones	25 x 23 cm

COMPOSICIÓN

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride.....0.2%

Alkyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride.....0.2%

MECANISMO DE ACCIÓN

La acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de energía, la desnaturalización de proteínas celulares esenciales y la alteración de la membrana celular.

Microorganismo	Tiempo contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	1 minuto	99.9%
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 9027)		
<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 6633)		
<i>Aspergillus niger</i> (ATCC 16404)		
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)		

VIDA UTIL

2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Seguro para la manipulación del personal de limpieza.
- Sanikleen wipes es una toallita duradera, no tejida y totalmente saturada que no se seca ni se pliega durante su uso.
- Minimizan el riesgo de contaminación cruzada
- Su tamaño y humectación garantizan una mayor cobertura de las superficies
- Su practicidad facilita una mayor adherencia a los protocolos de limpieza y desinfección.
- Requiere poco espacio de almacenamiento
- Su empaque garantiza la humectación y la integridad del producto

RECOMENDACIONES DE USO

Limpieza y desinfección en un solo paso del ambiente hospitalario, equipos biomédicos y superficies de alto toque.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia





FICHA TÉCNICA

MODO DE USO

1. Abrir el empaque y tomar un paño.
2. Emplear una técnica que permita optimizar el uso del paño
3. Comenzar a limpiar de la zona más contaminada hacia la zona más limpia
4. Garantizar un tiempo de contacto de mínimo un minuto
5. Dejar secar al aire
6. No requiere enjuague
7. Descartar el paño en bolsa de material biológico.
8. No humectar de nuevo ni reusar.

RECOMENDACIONES

- Solo para uso externo
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- El paño debe ser descartado en la caneca correspondiente y no en el sanitario.
- No se debe reutilizar.
- No debe usarse como paño húmedo para bebés, cambio de pañal o para uso personal.
- Para superficies plásticas y pintadas se debe hacer una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- No debe usarse en superficies de madera sin pintar, mármol natural o latón.
- Se recomienda usar elementos de protección personal para manipular el producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, retirar los lentes de contacto y continuar lavando por al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.

- Piel

Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de ardor se debe suspender el uso del producto y enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste se debe consultar al especialista

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

PRESENTACIONES

Empaque por 72 paños

PARTIDA ARANCELARIA

38.08.94.19.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

