



ChloraPrep™

1. DESCRIPCIÓN COMERCIAL			No. REVISIÓN		No.FICHA	
ChloraPrep™			2		FT-001	
NOMBRE GENÉRICO			BECTON DICKINSON DE COLOMBIA PRODUCTO IMPORTADO			
Aplicador Estéril con Gluconato de Chlorhexidina (CHG) al 2% y Alcohol Isopropílico al 70% sin tinte y con tinte Naranja (colorante amarillo # 6)			SI	X	NO	
2. REGISTRO INVIMA						
NÚMERO REGISTRO INVIMA			FECHA DE VIGENCIA REGISTRO INVIMA			
2016 DM-0014213			13 de Enero de 2026			
TITULAR DEL REGISTRO INVIMA			BECTON DICKINSON			
IMPORTADOR(es)		Becton Dickinson de Colombia Ltda - Cota/ Cundinamarca.	TÉCNICA DE ESTERILIZACIÓN		Óxido de Etileno.	
FABRICANTE		CareFusion Corporation con domicilio en USA				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		I	VIDA UTIL		3 AÑOS	
DISPOSITIVO MÉDICO REUTILIZABLE		NO	TIPO DE DISPOSITIVO		No invasivo	
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO						
Aplicador estéril fabricado en Polipropileno de alta densidad, con solución de Gluconato de Clorhexidina (CHG) al 2% + Alcohol Isopropílico (IPA) al 70%, sin tinte y con tinte naranja (color amarillo # 6). Avalado por la FDA. Consta de una esponja libre de látex unida a un mango cilíndrico, que contiene ampolla hermética de vidrio (Borosilicato UPS Tipo 1 con triple Pared).						
4. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO						
Esponja libre de látex, aplicador plástico y ampolla hermética de vidrio (Borosilicato UPS Tipo 1 con triple Pared).						
5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						
Acción Rápida: Elimina una amplia variedad de microorganismos residentes en la piel. Efecto residual persistente: Mantiene su acción antiséptica documentada de 48 horas. Amplio Espectro: Es efectivo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a Metilina (SARM) y <i>Enterococcus r</i> resistente a Vancomicina (ERV), <i>Clostridium Difficile</i> , <i>Acinetobacter</i> , la mayoría de los virus y hongos. Activo en presencia de bioproductos rico en proteínas: permanece activo en presencia de Sangre, Suero y otros bioproductos ricos en proteína. Técnica: Los aplicadores estériles y desechables, elimina el contacto directo con la zona de preparación, contribuyendo a reducir la contaminación cruzada. Esponja de Fricción: La consistencia de la esponja para fricción suave, garantiza que la solución penetre las 5 primeras capas de la piel donde reside el 80% de los microorganismos.						
6. RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO						
ChloraPrep sin tinte: Indicado para realizar la asépsia de la piel, previo a un procedimiento médico invasivo y mantenimiento del mismo. ChloraPrep con tinte: Indicado para realizar la asépsia de la piel, previo a un procedimiento Quirúrgico y otros procedimientos invasivos.						
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO						
Solo para uso externo sobre la piel. No usar en menores de 2 meses de edad. Evitar el contacto con membranas mucosas, ojos. Si la solución entra en contacto debe de lavarse inmediatamente con abundante agua. Evitar su uso en heridas abiertas. Evitar el contacto con el tejido Neural y Oído Medio. Solución inflamable. No cubra la zona a intervenir o use una fuente de Electrocauterio hasta que la solución este completamente seca (tiempo de secado: 1 a 3 minutos).						
8. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO						
REFERENCIAS CHLORAPREP SIN TINTE			REFERENCIAS CHLORAPREP CON TINTE			
Presentación	Catálogo	Unidad de Empaque	Presentación	Catálogo	Unidad de Empaque	
Aplicador Clear 1 ml	260480	60 aplicadores X caja/cubre 2.5" X 2.5"	Aplicador Orange 3 ml	260415	25 aplicadores X caja / cubre 4" X 5"	
Aplicador Clear 1.5 ml	260299	20 aplicadores X caja/cubre 2.5" X 2.5"	Aplicador Orange 10.5 ml	260715	25 aplicadores X caja / cubre 8.4" X 8.4"	
Aplicador Clear 3 ml	260400	25 aplicadores X caja/cubre 4" X 5"	Aplicador Orange 26 ml - /	260815	25 aplicadores X caja / cubre 13.2" X 13.2"	
9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO						
En lugar fresco y seco: Condiciones de almacenamiento: de 15 a 30°C (59-86°F), almacenar en condiciones no recomendadas hace que se presenten cambios en el tinte naranja. Evite el frío o calor excesivo, superior a 40°C (104°F).						
ELABORADO POR				FECHA		
Enf. Juan carlos Correa Sánchez Enf. Mario A. López Ayala				DÍA	MES	AÑO
				30	1	2018
REFERENCIAS CHLORAPREP SIN TINTE			REFERENCIAS CHLORAPREP CON TINTE			
						
1.0 ML CLEAR	1.5 ML CLEAR	3 ML CLEAR	3ML ORANGE	10.5 ORANGE	26 ML ORANGE	