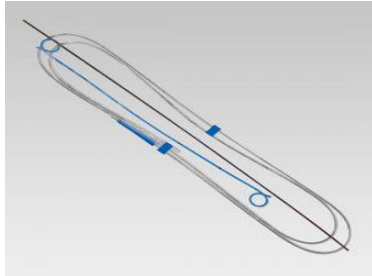


3APORTE MEDICO S.A.S	ANEXO	Doc. No.: ANEXO/DT/013.03
		Versión: 02
	FICHA TECNICA DE CATÉTER URETERAL JJ	Fecha : 2018-11-20
		Página : 1 de 3

NOMBRE GENERICO DEL DISPOSITIVO MEDICO	CATETER URETERAL JJ
SUBPARTIDA \ ARANCELARIA	9018390000
MARCA E IMAGEN	 UROTECH - Catéter Ureteral JJ
PRESENTACIONES COMERCIALES	Este dispositivo se suministra en empaque estéril y está compuesto por: • Catéter (Con diámetros variables de 3, 4, 4.7 Fr, 6 y 7Fr longitud igualmente variable de 10 a 24 cm. • Guía Flexible: Con diámetros variables de 0.32 a 0.38 pulgadas • Posicionador: 4.8 Fr a 7 Fr El dispositivo viene con la etiqueta donde se especifica las diferentes características del producto y la fecha de vencimiento.
VIDA ÚTIL	Cuatro años después de la fecha de fabricación.

3APORTE MEDICO S.A.S	ANEXO	Doc. No.: ANEXO/DT/013.03
		Versión: 02
	FICHA TECNICA DE CATÉTER URETERAL JJ	Fecha : 2018-11-20
		Página : 2 de 3

INDICACIONES Y USOS	El uso de los catéteres ureterales de tipo doble “J” es una práctica habitual en la urología tanto en el manejo de patologías agudas como en la prevención de complicaciones, estando asociado en la mayoría de los casos con la presencia de litiasis urinarias y dificultad en el drenaje en el aparato urinario. Las indicaciones para la colocación de catéteres ureterales son múltiples. • En el manejo de la litiasis urinaria, para prevenir o mejorar una obstrucción ureteral durante el paso de los fragmentos de cálculos desde el riñón a la vejiga a través del uréter. • Disminución de incidencia de complicaciones en receptores de trasplantes renales. • Presencia de litiasis mayor de 2 cm previo a la litotricia extracorpórea para favorecer la eliminación del cálculo y evitar la formación de calles litiásicas. • Manejo de obstrucción ureteral extrínseca • Infección urinaria alta secundaria a dificultad en el drenaje de orina. • Cólicos nefríticos que no ceden con tratamiento médico. • Tras intervenciones quirúrgicas como: endopielotomía, pieloplastia, incisión de estenosis ureteral, ureterolitotomía endoscópica. • Lesiones iatrogénicas del uréter durante cirugías ginecológicas o de otra especialidad.
ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES	• No utilizar el dispositivo si el empaque está abierto o dañado. • No utilizar el dispositivo después de la fecha de vencimiento • El dispositivo debe ser desechado después de su uso (uso único) • Guardar en un lugar seco y sin exposición a la luz solar • El 90% de los pacientes con catéter ureteral presenta algún tipo de síntoma urinario, siendo los más frecuentes la polaquiuria (aumento de la frecuencia urinaria), tenesmo (sensación permanente de deseo de orinar), disuria (ardor al orinar) y hematuria (sangre en la orina). El dolor o algún tipo de molestia se produce frecuentemente, localizado en la región lumbar o supra púbico.

3APORTE MEDICO S.A.S	ANEXO	Doc. No.: ANEXO/DT/013.03
		Versión: 02
	FICHA TECNICA DE CATÉTER URETERAL JJ	Fecha : 2018-11-20
		Página : 3 de 3

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Uso: Para drenaje temporal de la orina del riñón a la vejiga. El dispositivo está compuesto por: • Catéter ureteral de diámetro variable en doble JJ fabricado en poliuretano, con características de dureza y coeficiente de fricción adecuados para el uso indicado. Material radiopaco. • Guía flexible en acero inoxidable de diámetro variable, con revestimiento de teflón Posicionado por plástico • Gancho de sostén
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Proceso de esterilización de 12 horas con ETO (Óxido de etileno), temperatura del gas a 55 grados.
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO	Todo hospital, debe implementar un método de tratamiento para los residuos sólidos acorde con su magnitud, nivel de complejidad, ubicado geográfico, recursos disponibles y viabilidad técnica, que facilite la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria para los Residuos Biocontaminados. Para desechos residenciales debe ser empacado y desechado como residuo contaminado.

3APORTE MEDICO S.A.S	ANEXO	Doc. No.: ANEXO/DT/013.03
		Versión: 02
	FICHA TECNICA DE CATÉTER URETERAL JJ	Fecha : 2018-11-20
		Página : 4 de 3