

Catéter epicutáneo cava de 2 Fr de 30 cm


Catéter de epicutáneo de silicona radiopaco con marcación en todo el cuerpo del catéter, de una 1 vía con un diámetro de 2 Fr y longitud de 30 cm. En el extremo proximal tiene un racor de conexión que permite la sujeción o separación del catéter de forma sencilla. Cuenta con un prolongador de 2 mm de diámetro externo y 1,5 mm de diámetro interno que termina con un conector luer lock proximal. Set incluye 1 Catéter en silicona, 2 cinta métrica y un introductor tipo mariposa.

Marca: SILMAG

Material: Catéter en silicona con conectores en plástico grado médico.

Indicaciones de uso:

Permite la administración intravenosa de fluidos por períodos prolongados con el objetivo de preservar el capital venoso, permite nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares y medicamentos vesicantes.

Fabricante: SILMAG S.A.

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Material 100% Silicona.	Biocompatible con el paciente sin presentar reacciones.
Marcación cada 5 cm de forma numérica	Permite identificar más fácilmente hasta donde introducir el catéter.
Silicona radiopaca	Máxima visualización con Rx.
Extremo de prolongador con racor de conexión	Permite la sujeción o separación del catéter de forma sencilla, facilitando retirar el introductor butterfly.



Precauciones:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de este dispositivo.



Contraindicaciones:

Según criterio médico.

Humedad 40% - 85%

Dispositivo de un solo uso

SI

Temperatura almacenamiento

Temperatura ambiente

Método

Óxido de Etileno

Ciclos de reprocesamiento

Ninguno

Disposición Final

Incineración



Condiciones de Reprocesamiento: Dispositivo de uso único por paciente que no debe ser reutilizado ni re esterilizado.

Registro Sanitario	2022DM-0026104
Clasificación de riesgo	III
Vida útil	5 años
Calibración	NO
Presentación comercial	Unidad
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	Unidad



Observaciones:

- **Verificar la integridad del envoltorio.**
- **Verificar fecha de vencimiento**
- **Mantenga el producto en un lugar oscuro y fresco alejado de los rayos solares.**
- **Se recomienda un flujo de 2 ml/hora.**
- **Los líquidos administrados por bolo con jeringa, inferiores a 10 ml pueden provocar ruptura del catéter.**
- **Una vez retirado el producto debe ser desechado como material contaminado, los componentes metálicos deben desecharse como material cortopunzante.**