



Alterna Convex

Barrera de Ostomía Convexa



- **Descripción:**

Se trata de un dispositivo múltiple donde el disco adhesivo tiene una forma convexa especialmente diseñada para adaptarse a estomas retraídos o con pliegues. Adherencia 100% a la piel, semi-rígida para máximo acople a la piel. Ajuste al cierre hermético no desechable con las Bolsas Alterna Free y Alterna Uro.

- **Composición del Producto:**

Barrera: Espiral marrón: Polisobutileno, polímeros adhesivos
Espiral blanca: Carboximetilcelulosa sódica, polímeros adhesivos
Película de polietileno - poliuretano en su cara externa
Aro: Alterna flexible

- **Características y Acciones del Producto**

- La resina marrón, con mayor concentración de polímeros, favorece la adhesividad y fijación
- La resina blanca, con mayor cantidad de hidrocoloides, tiene un elevado poder de absorción, aportando una elevada protección cutánea, astringente
- El adhesivo es más grueso en el centro para una mayor capacidad de absorción y más fino en la periferia para una mayor adaptabilidad al relieve cutáneo
- La cara externa del adhesivo tiene una estructura radial para aumentar la flexibilidad del mismo y la adaptabilidad
- Bordes biselados
- Film protector con guía de corte
- Incorpora una pestaña que favorece la retirada del film protector y del adhesivo sobre la piel con facilidad



- Lleva 2 orejas para poder adaptar un cinturón en aquellos casos en los que sea necesario

- **Indicaciones**

Convex: Solución para ostomías planas, retraídas o con cicatrices grandes, dobladuras o hoyos. También para ostomías difíciles de manejar como ileostomías y urostomías.

- **Instrucciones de Uso**

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio, es más fácil si empieza por adherirla por debajo del estoma y luego hacia arriba
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel que rodea el estoma, asegurándose que quede bien sellada
6. A continuación, coloque la bolsa

- **Presentaciones**

Diámetros: 40 mm., recortable de 10 a 33 mm.
50 mm., recortable de 10 a 43 mm.
60 mm., recortable de 10 a 53 mm.

Cajas por 4 unidades

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA CONVEX



Coloplast

- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 3 años