



Q-SOAP ENZIMÁTICO

CERTIFICACIÓN INVIMA 2012014561



1. DESCRIPCIÓN

- **Componentes:** Posee enzimas (Lipasa, amilasa y proteasa), pH neutro, baja espuma, biodegradable, libre de fosfatos.
- Detergente líquido multienzimático.

Presentación comercial: Envases plástico 120 ml, 500 ml, 1000 ml, Galón Y 20 L.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Limpieza de instrumental quirúrgico y endoscópico en consultorios odontológicos, médicos, clínicas y laboratorios microbiológicos.
- Limpiezas en áreas y superficies.

3. ESTABILIDAD

Para asegurar la estabilidad del producto:

- No mezclar con otros productos de limpieza.
- Almacenar en lugar fresco y protegido de la luz.
- No adicionar agua al envase original.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Diluir aproximadamente 7 ml de Q-SOAP ENZIMÁTICO en 1 litro de agua.
- Agitar hasta disolución total.
- Sumergir el instrumental a limpiar.
- Dejar por un periodo de 5 a 10 minutos.
- Frotar con cepillo suave, de ser necesario.
- Enjuagar con abundante agua.

5. PRECAUCIONES

- Antes de usar el producto ver las instrucciones.
- Rotular los recipientes adecuadamente.
- Utilizar guantes para manipular el producto.
- No mezclar con otros productos de limpieza o desinfección.
- En caso de contacto con ojos y/o mucosas lavar la zona con abundante agua.
- En caso de ingestión consultar al médico.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Cerrar herméticamente el recipiente.

#Prodont
TeCuida >>>



Q-SOAP ENZIMÁTICO

CERTIFICACIÓN INVIMA 2012014561

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- http://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/LIVRO-2_miolo6_diagrama%C3%A7%C3%A3o-final.pdf#page=103X

#Prodont
TeCuida >>>