



BACTIXIDE PLUS

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-004284-R2

1. DESCRIPCIÓN

- Líquido incoloro, libre de partículas extrañas, con olor a limón, pH ácido de 4.5 – 5.5.
- Contiene Glutaraldehído 2%.
- Microbicida, anticorrosivo.
- Va acompañado de polvo alcalinizante que al adicionar cambia la solución a un color verde esmeralda, y pH alcalino de 7-5 – 8.5
- lo cual indica la activación del producto, de tal forma que se alcance la mayor velocidad de desinfección.
- Producto recomendado para odontólogos, profesionales de la salud y uso hospitalario

Presentación comercial:

Envases plástico de 500 mL, 1,000 mL y 3,785 mL.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Bactericida (Activo contra M. tuberculosis y Pseudomonas), Virucida (Activo contra VIH, Hepatitis y Herpes), Fungicida, Esporicida. Desinfectante bactericida y esterilizante en frío de acción rápida, para equipos e instrumental médico, quirúrgico, odontológico.
- Las ventajas de BACTIXIDE PLUS, además del corto tiempo necesario para alcanzar la desinfección frente a otros productos es su gran actividad contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, esporas, hongos y virus.
- Gracias a su anticorrosivo de alto poder, protege el instrumental contra la oxidación. Efectivo en presencia de materia orgánica como proteínas, sangre, saliva, mucosa, etc.

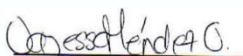
3. ESTABILIDAD

#Prodont
TeCuida >>>

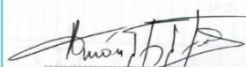
- El producto se conserva estable por tres años, almacenado en sitio fresco, bien tapado y alejado de la luz. Una vez activado se mantiene estable por un tiempo no superior a 30 días.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

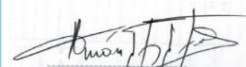
ELABORÓ


Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ


Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ


Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.



BACTIXIDE PLUS

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-004284-R2



4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Adicionar a la solución de BACTIXIDE PLUS todo el contenido del polvo activador y agitar el recipiente por 30 segundos. La solución toma un color verde, indicando que está activada.
- Seleccionar un recipiente plástico o de acero inoxidable, limpio y con tapa, colocar suficiente BACTIXIDE PLUS activado, de acuerdo a la cantidad de material a desinfectar y/o esterilizar.
- Previamente, lavar muy bien el instrumental o material a desinfectar y/o esterilizar.
- Sumergir totalmente el material a desinfectar y/o esterilizar en BACTIXIDE PLUS activado y tapar el recipiente.
- Para un alto nivel de desinfección, dejar el material sumergido en BACTIXIDE PLUS activado por un periodo de 10 minutos, a temperatura ambiente.
- Para un alto nivel de esterilización, dejar por un tiempo mínimo de 6½ horas a temperatura ambiente y proteger del contacto con otros materiales no estériles.
- Retirar el material de la solución y enjuagar con agua destilada o recientemente hervida.
- Recuerde que la solución es de ÚNICO USO. Cada vez que necesite desinfectar y/o esterilizar debe usar una nueva porción de producto.
- Después de activado, el producto tiene 30 días para consumirse.

5. PRECAUCIONES

- Antes de manipular el producto lea las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- No ingerir este producto. En caso tal, consultar al médico y presentar esta ficha técnica.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua.
- Utilice protección adecuada.
- No utilizar BACTIXIDE PLUS en forma de aerosol (con atomizador), ni hacer diluciones.
- Cerrar herméticamente el recipiente.
- Lavar manos y guantes después de usar BACTIXIDE PLUS

#Prodont
TeCuida >>>

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

ELABORÓ

Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.