

## FICHA TECNICA

7700410



**NOMBRE:** Media antiembólica hasta el muslo talla S

### DESCRIPCIÓN:

Media T.V.P Antiembólica hasta el muslo talla S, con puntera abierta para inspección y talón marcado para buen posicionamiento. Con refuerzo superior sin caucho que evita comprimir el músculo manteniendo la media en su posición, fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando compresión graduada de 18mmHg. Contiene suavizante textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Contiene Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

### INDICACIONES DE USO:

Medias antiembólicas y antitrombóticas para uso pre y post quirúrgico, en la prevención de la Trombosis Venosa Profunda (TVP) y reducir probabilidad de Embolia Pulmonar (EP) para uso en conjunto con la terapia de compresión vascular intermitente.

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Puntera abierta para inspección, refuerzo superior confortable sin caucho que evita oprimir el músculo, fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad. Con suavizante textil que brinda elasticidad y facilidad de postura. Con Antibacterial.

### PRECAUCIONES:

Indicadas solo para uso hospitalario. La selección de la talla debe ser acorde a lo indicado en la tabla de tallas. La indicación de uso se debe evaluar según el riesgo del paciente de TEV y sangrado siguiendo la política y procedimiento local.

### CONTRAINDICACIONES:

Enfermedad arterial periférica sospechada o comprobada, neuropatía periférica grave, alergia al material, edema masivo de la pierna o edema pulmonar, afección local de la piel o de los tejidos blandos. Deformidad de la pierna que impiden su ajuste.

### MATERIAL:

Composición textil es Nylon 80%, Spandex 20%.

### CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

De uso único por paciente, si fuera necesario lavar las medias, realizarlo a mano a una temperatura máxima de 40°C, no usar blanqueador, no secar en máquina, secar en tendedero a la sombra y no planchar.

**METODO:** Ninguno

**DISPOSICIÓN FINAL:** Incineración

**REGISTRO INVIMA:** 2019DM-0003826-R1

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO** I

### PRESENTACIÓN:

**FABRICANTE:** Ortopedicos futuro colombia s.a.s

**MARCA:** TEXPON S.A.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

| Características del producto             | Método de Análisis         | Tolerancia |
|------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Compresión: Mediana                      | Hatra y Salzmänn Mesh MST  | 15-20 mmHg |
| Color: Blanco                            | Espectrofotómetro          | De 0 - 1   |
| Talla: S – M – L – XL                    | Long stretch/Cross stretch | +/- 4 cm   |
| Estilo: Hasta el Mulo y hasta la Rodilla | Visual                     | N/A        |
| Textura: Opaco                           | Visual                     | N/A        |

## Rangos de presión:

Muslo: 8 mmHg

Muslo bajo: 10 mmHg

Rodilla: 10 mmHg

Pantorrilla: 14 mmHg

Tobillo: 18 mmHg

Selección de talla de media de compresión progresiva T.V.P. según medidas

## Talla S:

Punto de medida: Circunferencia Pantorrilla: Hasta 31,8 cm - Largo pierna: 73,7cm a 78,7cm

## Talla M:

Punto de medida: Circunferencia Pantorrilla: Hasta 31,8 cm a 36,8cm - Largo pierna: 73,7cm a 78,7cm

## Talla L:

Punto de medida: Circunferencia Pantorrilla: 36,8cm a 41,9cm - Largo pierna: 73,7cm a 78,7cm

## Talla XL:

Punto de medida: Circunferencia Pantorrilla: 41,9cm a 47cm - Largo pierna: Hasta 78,7cm

## Condiciones de almacenamiento

Temperatura: Hasta 30°C

Humedad: 65% +/- 10%

Circulación de Aire: El área debe tener ventilación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)

Luz solar: Evitar la exposición directa a la luz solar

Control de plagas: Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos.

Polvo y contaminación: Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto.