

HOJA DE SEGURIDAD TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA MT 3001



- Este instrumento debe usarse únicamente para medir la temperatura corporal.
- Se debe respetar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de bip.
- No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléctricos tales como teléfonos móviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivo a una distancia de estos aparatos cuando lo utilice.
- Proteja el instrumento de impactos y caídas.
- Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior a 60°C. El instrumento NUNCA debe ser hervido.
- No almacene el instrumento bajo la luz directa del sol, a una temperatura elevada, o en condiciones de alta humedad o polvo. Puede reducir el rendimiento.
- Para limpiar la carcasa exterior del termómetro, utilice un algodón impregnado en alcohol al 70%.
- No utilice el dispositivo si usted piensa que está dañado o si algo parece extraño.
- Asegúrese de que los niños no usen este dispositivo sin supervisión, algunas partes son lo suficientemente pequeñas como para ser tragadas.



Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desechar junto con la basura doméstica.



Siga las instrucciones de uso, lea atentamente el manual de instrucciones.



Pieza aplicada tipo BF.



Mantener el lugar seco.