

HOJA DE SEGURIDAD TERMÓMETRO DE FRENTE SIN CONTACTO NC 200



- No sumerja el dispositivo en el agua o en ningún otro líquido.
- No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna anomalía.
- Nunca abra el dispositivo.
- Un efecto fisiológico básico, llamado vasoconstricción, puede ocurrir en la fase temprana de la fiebre, resultando en un efecto de piel fría, por lo que la temperatura registrada usando este termómetro puede ser sospechosamente baja.
- El dispositivo está integrado por componentes sensibles y se debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones del almacenamiento y funcionamiento.
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunas de las piezas más pequeñas.
- No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléctricos tales como teléfonos móviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 3.3 metros de estos aparatos cuando lo utilice.
- Proteja el dispositivo de:
 - ✓ Temperaturas extremas
 - ✓ Impactos y caídas
 - ✓ Contaminación y polvo
 - ✓ Luz directa del sol
 - ✓ Calor y frío
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extraiga las pilas.

ADVERTENCIA: El resultado de medición dado por este dispositivo no es un diagnóstico. No está reemplazando la necesidad para la consulta de un médico, especialmente si no coincide con los síntomas del paciente. No confíe solo en el resultado de la medición, considere siempre otros síntomas potencialmente presentes y la retroalimentación del paciente. Se aconseja llamar a un médico o una ambulancia si es necesario.