

Fijador Adhesivo para Catéter Foley. DALE®-GHC

REF 150



REGISTRO INVIMA CLASE

2020DM-0020975
Clase: IIACÓDIGO DE BARRAS
UNIDAD COMERCIAL

REF. 150: 20872237009248



EMPAQUE

1 und/Sobre,
(50) Und/Caja**Vida Útil de 5 años**
Si se almacena de acuerdo a
recomendación del fabricante

Descripción

FIJADOR ADHESIVO PARA CATÉTER FOLEY. DALE® - GHC

El soporte para sonda vesical DALE® (Foley Hold-n-Place®) es un dispositivo médico de uso único que está diseñado para asegurar los catéteres y reducir la probabilidad de remoción traumática, erosión uretral, espasmos y traumatismos de la vejiga. Permite agilizar los procesos de atención de enfermería y le da a la sonda vesical estabilidad sin restringir la movilidad del paciente y sin lesionar la piel. Puede utilizarse sin restricción en cualquier tipo de catéter Foley incluidos los catéteres recubiertos de teflón, plata y silicona.

Indicaciones de uso

Indicado para todos los pacientes portadores de sonda Foley teniendo en cuenta algunas recomendaciones para elegir el sistema de fijación:

- ✓ Corto plazo se define por el fabricante hasta 14 días de cateterismo.
- ✓ El parche adhesivo es una solución a corto plazo para pacientes con sonda de Foley.
- ✓ Adecuado para pacientes con afecciones vasculares.
- ✓ Puede usarse en el ambiente hospitalario en servicios de UCI y hospitalización.
- ✓ Puede usarse con seguridad en pacientes con antecedentes de diabetes, de flebitis o de enfermedad circulatoria.
- ✓ No se recomienda su uso en pacientes diaforéticos por limitaciones en la adhesión a la piel.

Características

El dispositivo esta conformado por:

Sistema adhesivo hipoalergénico de fijación elaborado en cinta médica de plástico sensible a la presión, libre de látex y de DEPH, suave con la piel. Cuenta con un sistema de seguridad dado por unas aletas de velcro que impide desplazamiento inadvertido de la sonda, evitando lesiones de la piel y de la uretra. Las aletas de sujeción de velcro permiten reposicionar varias veces la sonda sin sacrificar la seguridad ni la integridad de la piel del paciente.


Los parches adhesivos DALE® (Foley Hold-n-Place®) vienen en empaque individual listos para ser utilizados y están diseñados pensando en la comodidad del paciente y en la seguridad del clínico.

Ventajas clínicas

Características	Beneficios	Ventajas Clínicas
Exclusivas Lengüetas de Bloqueo	• Fijar cualquier tipo de sonda vesical. • Adhesivo resellable y velcro verde que permite el reposicionamiento de la sonda vesical. • Asegura la sonda evitando la tracción. • Ayuda a prevenir el movimiento de la sonda y la extracción accidental. • Estabiliza el catéter para evitar el pistoneo y el desplazamiento accidental, lo que ayuda reducir la probabilidad de irritación del meato, que es un factor causal de infecciones en el tracto urinario (UTI).	• Compatible con todos los tamaños y referencias de sondas Foley. • El catéter no puede deslizarse ni salirse de su posición. • Previene desplazamientos inadvertidos que pueden resultar en mayor costo, tiempo y riesgo de infección. • Proporciona una fijación segura del catéter de Foley sin utilizar esparadrapo que puede generar lesiones en la piel. • Simplifica el cuidado de la sonda facilitando la labor de enfermería.
Seguridad	• Diseñado para disminuir la probabilidad de desplazamientos y/o salidas accidentales del catéter. • Minimiza los movimientos innecesarios del catéter que pueden causar lesiones.	• Previene la salida accidental de la sonda • Evita lesiones de piel • Minimiza riesgo de infecciones.
Base Adhesiva	• Material transpirable suave con la piel. • Transparente e hipoalergénica. • Libre de látex. • Libre de DEHP	• Evita lesiones asociadas a adhesivos y a dispositivos médicos. • Ideal para pacientes con alta sensibilidad a adhesivos y al látex. • Resistente al agua. • No deja residuos de adhesivo sobre la piel. • Adherencia en la piel hasta por 3 días.
Materiales Suaves	• Sin partes plásticas que puedan generar lesiones en la piel del paciente. • Fácil de colocar y retirar	• Evita lesiones de la piel • Evita lesiones en la uretra. • Indicado en todo tipo de pacientes.

Características	Beneficios	Ventajas Clínicas
Versátil	Tamaño universal	• Compatible con todas las referencias y tamaños de sonda. • Puede asegurarse de la sonda en el puerto en Y o de la manguera de la bolsa de recolección de orina. • Permite reposicionar la sonda.
Facilidad de Uso	• Desechable, uso en un solo paciente. • Libre de látex. • Previene la hipersensibilidad al látex. • Libre de DEHP.	• Listo para usar. • No requiere uso de cintas adhesivas adicionales.

Producto y estructura




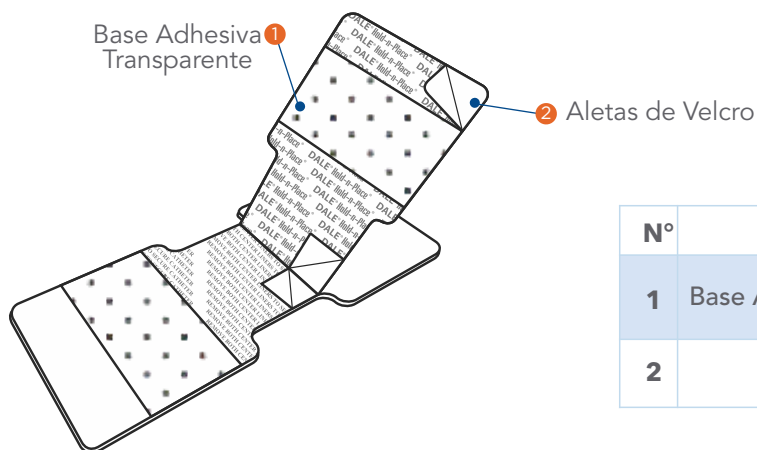


Nº	Estructura	Material
1	Base Adhesiva Transparente	Poliuretano transparente con adhesivo sensible a la presión.
2	Aletas de Velcro	Caucho grado médico tejido, nylon elástico.

Instrucciones de uso

Para el uso del fijador adhesivo de catéter Foley, siga las siguientes instrucciones:

- ✓ Limpiar y preparar el área de aplicación y verificar que se encuentre seca. Afeitar la zona si es necesario. Si está disponible, aplicar una película protectora sin alcohol para proteger la piel en riesgo.
- ✓ Abrir el empaque del dispositivo para exponer los revestimientos centrales. (A)
- ✓ Retirar ambos revestimientos centrales y colocar el catéter urinario sobre el adhesivo expuesto. (B)
- ✓ Envolver la lengüeta de bloqueo más allá del lumen del catéter, donde la bolsa de drenaje conecta. Aplicar el producto adhesivo sin tensar, tirar o estirar. Se puede quitar el revestimiento superior para una mayor seguridad. (C)
- ✓ Retirar los revestimientos base para exponer el adhesivo y pegar sobre la piel (C). Alisar el parche adhesivo en su lugar con una presión suave y firme, evitando espacios y arrugas desde la parte central hacia los extremos.
- ✓ Cambiar a los 3 días o antes si se evidencian riesgos de seguridad por desprendimiento del adhesivo.
- ✓ Descontinuar su uso si el paciente presenta eventos adversos relacionados con el uso del dispositivo.

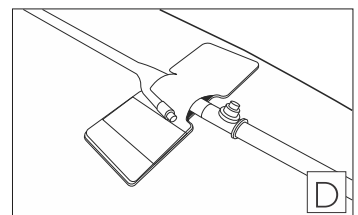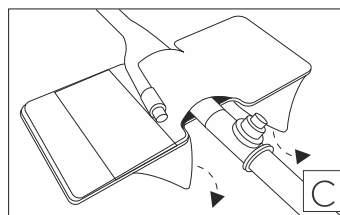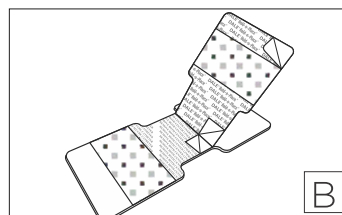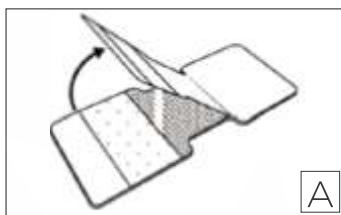

Instrucciones de uso

La pestaña de bloqueo de velcro se puede levantar para reposicionar la sonda cuando sea necesario.

- ✓ En la parte superior del adhesivo se pueden registrar datos relevantes del dispositivo.
- ✓ El soporte se puede utilizar con la misma eficacia en todos los catéteres de Foley, incluidos catéteres recubiertos de teflón, plata y silicona.

RECOMENDACIONES PARA EL RETIRO

- ✓ Aflojar los bordes del parche adhesivo.
- ✓ Con los dedos de la mano opuesta, empuje la piel hacia abajo y lejos del adhesivo.
- ✓ Retirar el dispositivo lentamente en la dirección del crecimiento del cabello, manteniéndolo horizontal y cerca de la superficie de la piel.
- ✓ A medida que se retira el producto, continúe moviendo los dedos de la mano opuesta para dar soporte a la piel recién expuesta.
- ✓ Utilice un removedor de adhesivo médico si es necesario para aflojar la unión adhesiva. Considerar lubricar la piel si no se va a volver a poner otro sistema adhesivo de sujeción para la sonda.

Precauciones y advertencias

- ✓ Para uso único, desechar después de su uso.
- ✓ Verificar estado de la piel del paciente antes de su uso.
- ✓ No lo use si el paquete está abierto o dañado.
- ✓ Vigilar estado de la piel mientras este en uso el dispositivo para controlar posibles complicaciones. Si el paciente presenta reacción cutánea, suspender su uso e informar al médico.
- ✓ Si el producto se reutiliza hay riesgo de no tener resultados adecuados y se expone a problemas de seguridad al paciente.
- ✓ Verificar antes de usar antecedentes del paciente relacionados con sensibilidad cutánea o alergias a los materiales de la fijación.
- ✓ El producto mantiene sus características siempre y cuando se sigan las recomendaciones de almacenamiento, transporte, instrucciones de uso y desecho.

Almacenamiento y transporte

- ✓ Almacenar en lugar ventilado, seco y limpio.
- ✓ Mantener libre de gases corrosivos y evitar la luz solar directa.
- ✓ No almacenar a temperatura y humedad extremas. Temperatura de -20 a 65 C y Humedad Relativa menor al 80%.
- ✓ Evite apretar y colisionar durante el transporte y manténgalo en su empaque original.

Disposición final

- ✓ Una vez usado el dispositivo debe considerarse como un producto potencialmente biopeligroso.
- ✓ Debe desecharse de acuerdo con protocolo de cada institución o según la regulación legal local para la disposición final de dispositivos médicos.

Símbolos  Single Use / Uso único



Fabricante Dale®

Alertas sanitarias o eventos adversos:

Hasta ahora no hay alertas sanitarias o eventos adversos ocurridos con este producto.