

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 22/07/20
	CIRCUITO DE VENTILACIÓN ALMA LISA	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico desechable utilizado para la administración de gases medicinales garantizando con eficiencia la eliminación de CO₂ y ofreciendo la mínima resistencia durante la respiración mediante una manguera que lleva el oxígeno desde la salida del ventilador hacia el sistema respiratorio del paciente y otra que recoge los gases exhalados desde el paciente hacia el ventilador. Por tener lisa la superficie interior de la manguera permite que el flujo del gas que va a ser entregado al paciente sea laminar con ventajas para el confort y mecánica ventilatoria del paciente.

COMPOSICIÓN: Mangueras alma lisa (L=1.60m) (PVC), diámetro 15mm (Pediátrico) y 22mm (Adulto), con conectores flexibles con diámetro de 22mm (PP), desechable, libre de látex, con conector en Y, codo giratorio con tapa y puerto de capnografía.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad (todos sus componentes ensamblados) en bolsa de plástico transparente, sellada, 10 unidades (bolsas)/corrugado.

Ítem	Descripción	Empaque	Códigos de Barras	N° Registro Invima
63-615	Circuito de Ventilación Adulto, Alma Lisa	10 circuitos/caja	Unidad: 872237008438 Corrugado: 40872237008436	2017DM – 0001253 R1 Vigente hasta 18 Sep 2027. Riesgo IIA
63-665	Circuito de Ventilación Pediátrico, Alma Lisa	10 circuitos/caja	Unidad: 872237008445 Corrugado: 40872237008443	

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Acondicionamiento de las mezclas gaseosas ventilatorias del paciente durante el soporte ventilatorio mecánico en pacientes con vía aérea artificial y necesidad de ventilación asistida por falla ventilatoria.


OPERACIÓN DEL EQUIPO:

1. Instale la vía inspiratoria del circuito en el respectivo puerto del ventilador.
2. Conecte de la misma forma la vía espiratoria del circuito al ventilador.
3. Verifique adecuado funcionamiento del equipo, sin fugas ni obstrucciones.
4. Conecte al tubo endotraqueal del paciente.
5. Verifique periódicamente el estado del paciente, la adaptación del circuito y funcionamiento del ventilador para asegurar adecuado desempeño del dispositivo.

OBSERVACIONES: Cerciorarse de que todas las conexiones estén aseguradas antes de su uso, Si cualquiera de las tapas de los puertos de presión y temperatura no están siendo utilizadas, verifique su cierre para evitar fugas. Evaluar la entrada y salida del aire durante la inspiración y espiración observando la PIP y la expansión torácica.

Descartar luego de usar, uso único por paciente. **No usar** si el paquete está abierto o dañado.

Vida útil: 3 años.

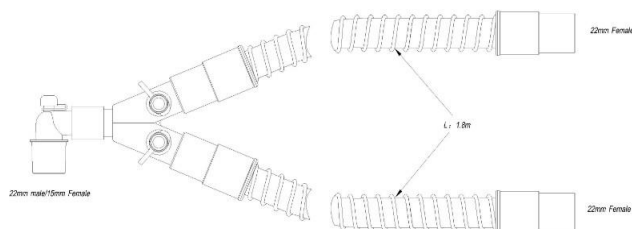

CIRCUITO DE VENTILACIÓN

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net