

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 18/01/19
	ESPACIADOR	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Es un dispositivo que se acopla al cartucho presurizado y que sirven para mejorar la inhalación de los medicamentos que se administran con cartucho presurizado, ya que no es necesario sincronizar la pulsación y la inspiración y no presentan el efecto "freón-frío"; la administración resulta muy cómoda. Los usuarios de las cámaras de volumen pequeño-mediano acostumban a ser los pacientes pediátricos principalmente, pero también se pueden usar en geriatría. Los adultos utilizan las cámaras de gran volumen. El dispositivo presenta máscara y doble válvula.

COMPOSICIÓN:

Componente	Material
Conector	PVC
Cámara	PC
Tapa y película	PC
Mascarilla	PVC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Talla	Tamaño de la Mascarilla (Largo x ancho) (mm)
S	(80*70) ±2
M	(100*80) ±3
L	(120*90) ±3

PRESENTACIONES COMERCIALES: 1 unidad por caja, 50 cajas por corrugado.

Item	Descripción	Empaque	Código de Barras	R. Invima
63-580	Espaciador Neonato	1 unidad por caja, 50 cajas por corrugado	Unidad: 872237009039 Corrugado: 40872237009037	2017DM-0001249 R1 Vigente hasta 18 Sep 2027. Riesgo: IIA
63-581	Espaciador Pediátrica		Unidad: 872237009046 Corrugado: 40872237009044	
63-582	Espaciador adulto		Unidad: 872237009053 Corrugado: 40872237009051	

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Aerosolterapia: Es la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria.

Es un procedimiento especializado que apoya diversas especialidades médicas en la prevención, tratamiento y rehabilitación de alteraciones que afectan directa o indirectamente la función del sistema respiratorio

FUNCIONES:

- Reduce la cantidad de medicamento que impacta en la región orofaríngea.
- Reduce la necesidad de coordinar la activación con la inspiración.
- Facilita el uso de los IDM durante los eventos obstructivos agudos.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL ESPACIADOR:

Antes de administrar el medicamento verifique los 5 correctos de la administración de medicamentos

1. Agitar el inhalador durante 30 segundos.
2. Remover la tapa protectora del inhalador.
3. Conectar el inhalador al Espaciador.
4. Realizar una inhalación profunda.
5. Ubica la máscara del espaciador de modo que la boca y la nariz queden cubiertas para evitar escapes de medicamento.
6. Realizar una inhalación lenta y activar el inhalador.

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 18/01/19
	ESPACIADOR	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

7. Después de una inhalación lenta y profunda, mantén la respiración de 5 a 10 segundos, tiempo necesario para que el medicamento se deposite en el pulmón.

8. Esperar un minuto y repetir el procedimiento según las inhalaciones indicadas por el médico.

9. Tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco.

RECOMENDACIONES

- No usar el inhalador directamente sin cámara espaciadora.
- Siempre haga inhalaciones lentas y con pausa respiratoria.
- No realice inhalaciones seguidas.
- Evite la incoordinación entre el disparo y la inhalación.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIADOR

- Desarmar totalmente el Espaciador.
- Utilice agua limpia y tibia con un detergente suave y sumerja completamente todas las partes. Luego enjuague con agua tibia.
- Confirmar que todas las piezas estén completamente secas para volver a utilizar el espaciador.

VENTAJAS DEL ESPACIADOR:

- No requieren una exacta coordinación entre la pulsación y la inspiración.
- Reducen el impacto en la faringe y los efectos adversos.
- Facilitan la distribución pulmonar del medicamento.
- No requieren un gran esfuerzo inspiratorio.
- Permiten la administración de fármacos con mascarilla a pacientes inconscientes.

VIDA ÚTIL: 5 Años.

ADVERTENCIAS:

- Los productos son para uso exclusivo de cada paciente.
- No utilice los productos si el paquete está roto o si el producto no es válido.

ESPACIADOR



ESPACIADOR

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:

Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net

Chile: infochile@globalhealthcare.net

Sitio web: www.globalhealthcare.net